

A Hollister Technology

.....

Hollister クリティカルケア

チューブ固定具

Confidence is in the air.


- アンカーファスト
気管内チューブ固定用ホルダー
- チューブ固定バリア
- ドレーン固定バリア
- 鼻管アタッチメント

 Hollister



Hollister クリティカルケア

チューブ固定具

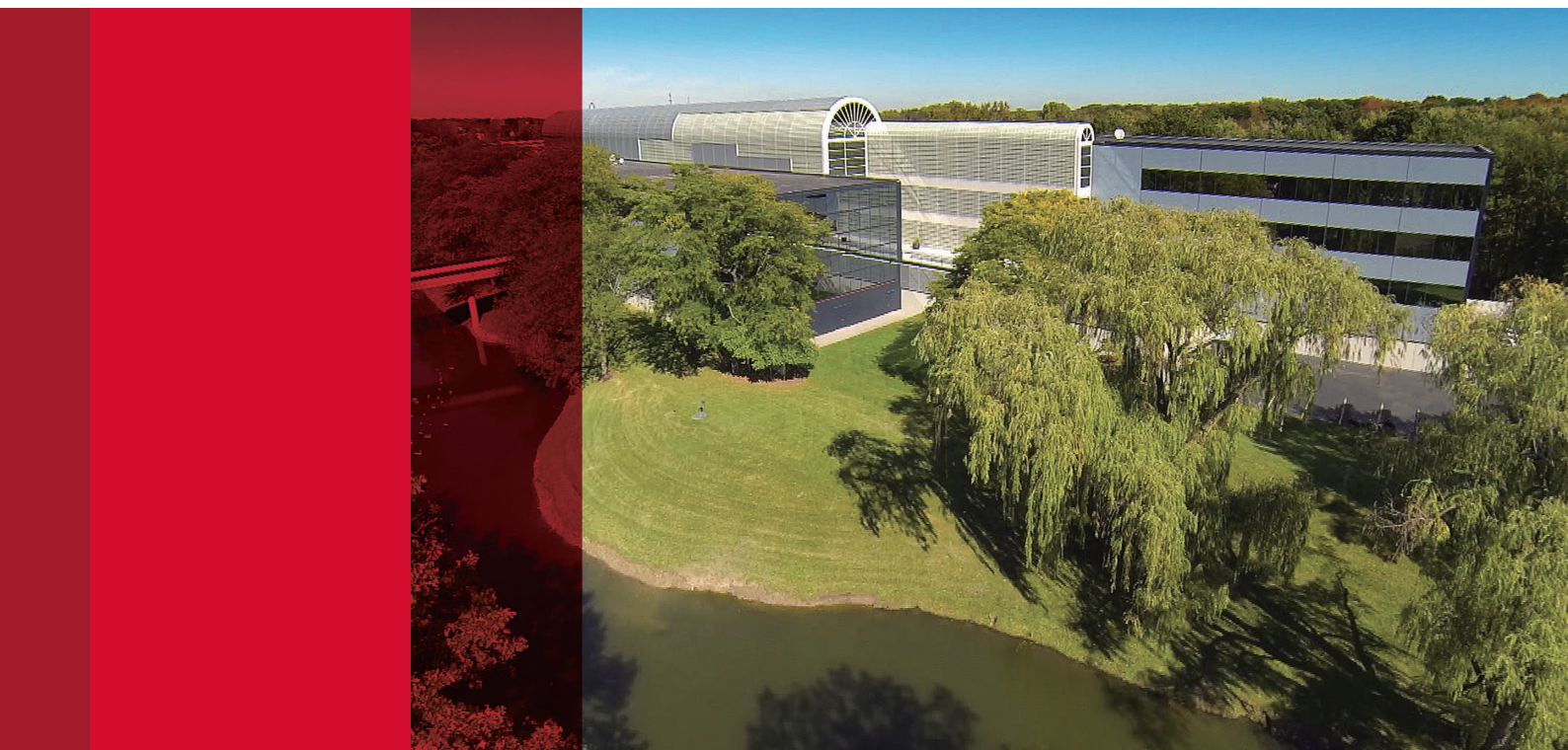

弊社製品に関するお問い合わせ

☎ 0120-956-937

ホリスター社について

ホリスター社は世界中で医療関連製品のサービス開発や製造および販売を展開する独立企業です。ストーマケア、コンチネンスケア、クリティカルケア製品などを製造するほか、医療従事者、ストーマ保有者および消費者の皆様を対象とする教育サポート資料を作成しています。ホリスター社は95年にわたって医療従事者、ストーマ保有者および消費者の皆様のために開発を続けており、弊社の製品とサービスを利用される方々の生活を更に豊かで尊厳のあるものにすることを使命としています。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。



製造業者

Hollister Incorporated

2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois 60048, USA

製造販売業者

株式会社 ホリスター

〒140-0002
東京都品川区東品川2-2-8
スフィアタワー天王洲21階

☎ 0120-956-937
FAX 03-6711-2860

www.hollister.com/japan




参考文献

- 1). Pieper, Barbara. "Mechanical Forces: Pressure, Shear, and Friction." Chapter 12 in Acute & Chronic Wounds: Nursing Management, 3rd ed., ed. Ruth A. Bryant (St. Louis, Mosby, Inc. 2007).
- 2). Panel for the Prediction of Prevention of Pressure Ulcers in Adults. "Pressure ulcer in Adults: Prediction Prevention." Clinical Practice Guidelines, Number 3, AHCPR Publication No. 92-0047. (Rockville, MD: Agency for Health Care Policy and Research, Public Health Service, U.S. Dept. of Health and Human Services. May 1992.)

Hollister のロゴ、アンカーファスト、フレックステンドならびにフレックスウェアは、Hollister 社の商標です。

©2015 Hollister Incorporated

チューブ固定具

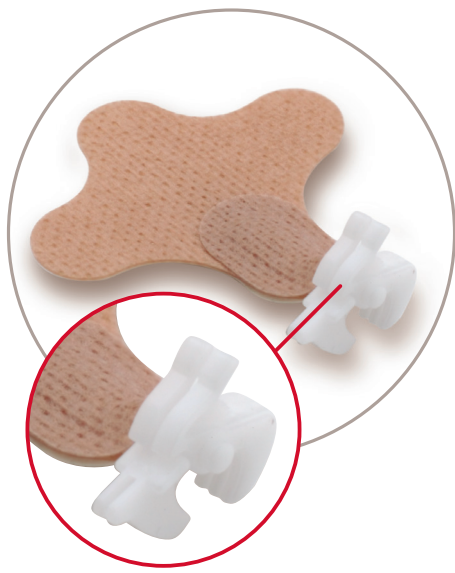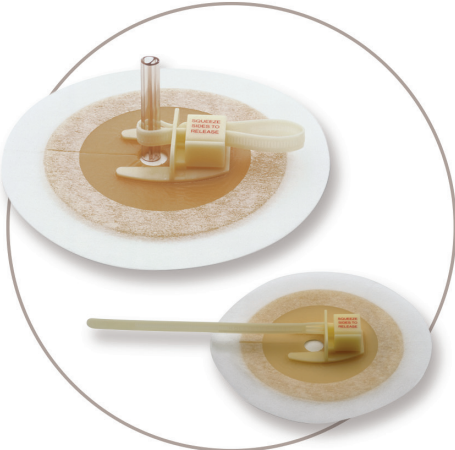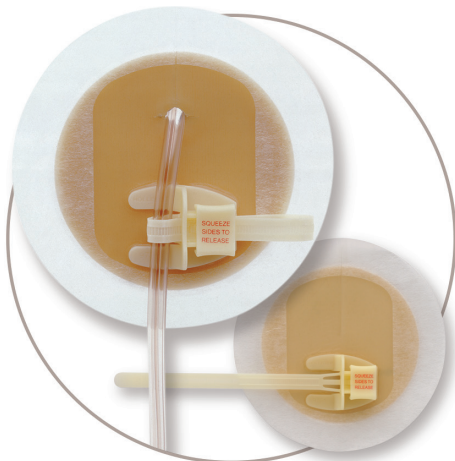

チューブ固定バリア (医療機器届出番号 13B3X10205H00006)		製品番号	入数
5 ～ 40Fr のドレーンやチューブ、カテーテルを挿入部または挿入部から離れた位置で水平に固定します。 - アジャスタブルクランプと鋸歯状ストラップでチューブを安全、確実に固定し、ずれや動きを防ぎます。 - フレックスウェア皮膚保護剤によって挿入部周囲の皮膚を保護します。装着期間の目安は 3 ～ 5 日間です。 - 外縁部には粘着テープがついています。(ガンマ線滅菌済み)		9781	5 個 / 箱
ドレーン固定バリア (医療機器届出番号 13B3X10205H00003)		製品番号	入数
5 ～ 40Fr のドレーンやチューブ、カテーテルを挿入部から垂直に固定します。 - アジャスタブルクランプと鋸歯状ストラップでチューブを安全、確実に固定し、ずれや動きを防ぎます。 - フレックスウェア皮膚保護剤によって挿入部周囲の皮膚を保護します。装着期間の目安は 3 ～ 5 日間です。 - 外縁部には粘着テープがついています。(ガンマ線滅菌済み)		9782	5 個 / 箱
鼻管アタッチメント (医療機器届出番号 13B3X10205H00004)		製品番号	入数
5 ～ 18Fr の胃管やイレウス管、ED チューブなどを固定します。 - 鋸型調整歯がチューブをしっかり固定します。 - 鼻の形状に合わせた蝶形の、肌に優しいフレックスウェア皮膚保護剤が皮膚の損傷を防ぎます。装着期間の目安は 3 ～ 5 日間です。 - 回転式クランプにより鼻孔への圧力を軽減します。(未滅菌)		9786	20 個 / 箱



アンカーファスト

取扱いクイックガイド

ラテックス フリー

装着手順

Step 1

装着部の皮膚の状態を整える

- 患者の装着部の皮膚を清拭し、よく乾燥させ皮脂残りがないようにしてください。
- スキンジェルやローションなどは使用しないでください。

Step 2

剥離紙をはがす

- 左右の皮膚保護剤パッドから剥離紙をはがしてください。

Step 3


本体を患者に装着する



- フォーム状のリップスペーサーが上唇中央部の上の皮膚に軽く触れるように置いて位置決めします。
- このとき、チューブ保持クランプは上唇の 1cm 余り下に位置するようにしてください。
- 両方の皮膚保護剤を皮膚に押し当てます。
- そのまま 30 秒間保持して皮膚にしっかり密着させてください。

Step 4


ネクストラップを装着する

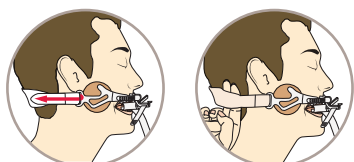

- ネックストラップを首に巻き、片方の細い端を皮膚保護剤の上にあるプラスチックループに通してください。
- 面ファスナーを仮止めしてください。
- ネックストラップに緩みやたるみがないように調整し、左右の面ファスナーを均等に締めます。このとき、きつく締め過ぎないように注意してください。
- ネックストラップと患者の後頭部の間に人差し指と中指が入る程度の余裕があることを確認してください。


Step 5

気管内チューブを固定する

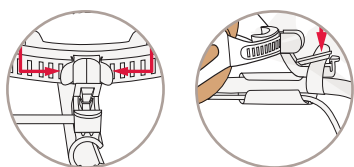


- シャトルクランプの両側のタブをつまみ、内側に押さえたままトラックレール上を移動させ、気管内チューブのちょうど真上に来るようにします。
- チューブストラップの剥離紙をはがし粘着面を露出させます。気管内チューブ表面がよく乾いて汚れが付着していないことを確かめた後、チューブストラップをしっかり気管内チューブの周囲に巻きます。
- 気管内チューブが滑り止め用グリップの下にくるようにします。
- 気管内チューブを固定する際に、インフレーションラインを滑り止め用グリップの直下に置かないように注意してください。チューブストラップを気管内チューブの周りにしっかりと巻き付け、残りの部分をチューブ保持クランプの上に置いて緩みがないように引いてください。
- チューブ保持クランプの上蓋をカチッと音がするまで閉じてしっかりと固定してください。

維持管理

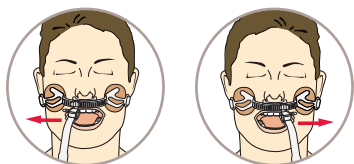

- シャトルの両側にあるタブをつまむと、気管内チューブをトラックレールにそって左右に動かすことができます。
- 継続的な圧迫による皮膚や唇の損傷を避けるために、少なくとも 2 時間に一度、1)、2)、必要があればより頻繁に、気管内チューブの位置変更を行ってください。

各部の名称

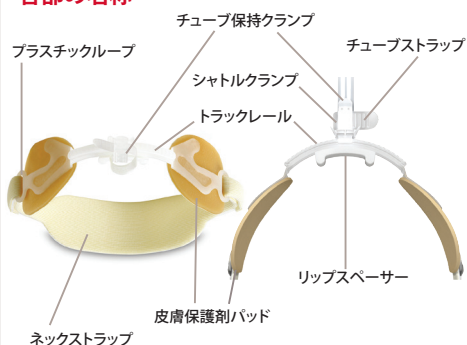

使用上の注意

- 本品は小児を対象とした製品ではありません。
- 次のような場合には、適用を慎重に検討してください；出歯、上前歯がないかまたは上の総義歯を装着できない患者で気管内チューブの使用に際して上顎による支持が十分に得られない場合、唇が肉厚または厚く腫れている、歯科装置を装着している場合、顔面が腫れた患者。
- 顔が毛深い患者においては、皮膚保護剤の粘着が弱くなる場合があります。
- 本品を装着後も、本品及び気管内チューブがしっかりと、正しく取り付けられているか頻繁に確認してください。
- 継続的な圧迫による皮膚や唇の損傷を避けるために、少なくとも 2 時間に一度、1)、2)、または必要に応じてより頻繁に、患者の唇や皮膚に異常がないか確認してください。
- 皮膚の発赤または炎症が生じた場合は本品の使用をすぐに中止してください。
- 位置調整のために気管内チューブを手前や奥方向に繰り返し動かすと、チューブストラップの粘着力が低下するおそれがあります。
- 気管内チューブを固定する際に、インフレーションラインを滑り止め用グリップの直下に置かないように注意してください。
- 本品は単回使用製品です。適切な粘着性を確保するためにも再使用はしないでください。

ワンクリック型
チューブ保持ク
ランプ付きチュ
ーブストラップ

- 気管内チューブの固定
- 内径 5-10mmの気管内チューブに対応
- 粘着剤付きチューブストラップと滑り止め用グリップが、気管内チューブを確実に保持
- チューブ保持クランプにより気管内チューブを適切な場所に固定
- クランプはワンクリックで解除でき、簡単にチューブの位置を変えることが可能

スライド式
シャトル
クランプ

- 口腔ケアが容易
- 気管内チューブを固定したまま簡単に左右に動かすことが可能
- 気管内チューブの位置を変えることにより、皮膚や唇への圧力を緩和

フレックス
テンド
皮膚保護剤

- 皮膚を保護
- アンカーファストをしっかりと固定
装着期間の目安は 4 ~ 7 日
- 皮膚に優しく、耐久性に優れた皮膚保護剤

アジャスタブル・
ネックストラップ

- より一層の安全を確保
- 交換が可能
- 皮膚に触れる表面には肌触りがよく、柔軟性に富んだトリコットニットを使用
- 長さの調節が容易

製品番号

製品名

入数

9799

アンカーファスト

12 セット / 箱

9788

アンカーファスト
(ネックストラップ)

4 個 / 箱

(未滅菌)
(医療機器届出番号 13B3X10205H00002)

アンカーファスト

気管内チューブ固定用ホルダー


アンカーファストは従来の医療用テープの固定法に比べて、容易な操作で、より確実に気管内チューブを固定することができます。



気管内チューブを固定したまま、簡単に左右に移動させることができるため、口腔ケアを容易に行うことができます。

よりよい口腔ケアのために

アンカーファストは、口腔ケアの際に気管内チューブを固定したまま簡単に左右に動かすことができます。ワンクリック型チューブ保持クランプ付きチューブストラップにより気管内チューブを適切な場所に固定します。クランプはワンクリックで解除することができ、簡単にチューブの位置を変えることができます。

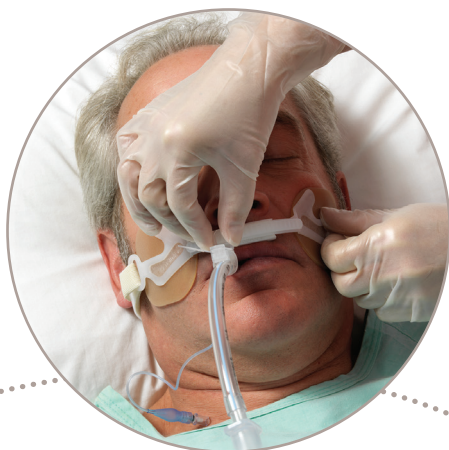

皮膚の保護のために

フォーム状のリップスパーサーにより、湿気による水滴の発生を防ぎ、また上唇とその周辺にかかる圧力を最小限におさえながら、気管内チューブをしっかり固定します。フレックステンド皮膚保護剤によって、適切な場所にしっかりと固定することができます。また皮膚に優しく、ラテックスフリーの耐久性に優れた皮膚保護剤で、健常な皮膚を保ちながら、長期装着が可能です。



アンカーファストに対応する交換用ネックストラップです。長期使用によりネックストラップが汚れてしまっても、単体いつでも交換することができます。