

ストーマ袋 装着方法

お手伝いされる方が装着する場合



1 フランジの吻合部に合わせて、袋を装着します。




2 面板とフランジの間に指が入るので、腹部を圧迫せずに装着できます。

3 装着した後、しっかりと吻合していることを再度確認してください。



浮動型フランジ

面板とフランジの間に指が入るので、手術後の痛みのある腹部を圧迫することなく装着できます。フランジが浮いているので、面板がとても柔軟で装着時の違和感を軽減できます。

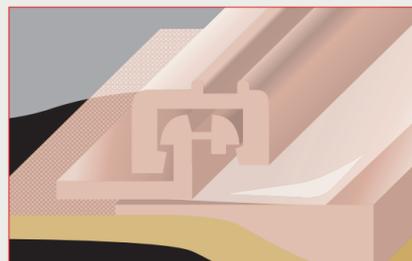

センターポイントロック

面板とストーマ袋のかみ合わせにより安全、確実にロックします。スポーツなどの活動時や就寝時にも安心してご使用できます。簡単に取り付け、取り外しができます。

ニューイメージ FFF テープ付



【粘着面】**緑** 10.8×10.8cm **青** 12.8×12.8cm

形成可能サイズ	フランジサイズ	製品番号
16~32mm	44mm	14102
16~43mm	57mm	14103
16~57mm	70mm	14104

包装単位：5枚/箱
価格 5,400円(非課税)

装着期間の目安
3~5
日間

FF フォームフレックス
皮膚保護剤

ニューイメージロックンロール



【ストーマ袋】30×14.5cm

フランジサイズ	製品番号
44mm	18192
57mm	18193
70mm	18194

ストーマ袋の色：透明
包装単位：10枚/箱
価格 3,800円(非課税)

ニューイメージロックンロールミニ



【ストーマ袋】22×14.5cm

フランジサイズ	製品番号
44mm	18292
57mm	18293

ストーマ袋の色：透明
包装単位：20枚/箱
価格 7,000円(非課税)

ニューイメージイレオストミーパウチ



【ストーマ袋】32×18.8cm

フランジサイズ	製品番号
44mm	18012
57mm	18013
70mm	18014

ストーマ袋の色：ウルトラクリア
包装単位：10枚/箱
価格 5,000円(非課税)

ニューイメージウロ



【ストーマ袋】23×15cm

フランジサイズ	製品番号
44mm	18402
57mm	18403
70mm	18404

※ウロ接続管1個付
ストーマ袋の色：透明
包装単位：10枚/箱
価格 5,900円(非課税)

- 商品のお問い合わせやご注文に際しては、品名、製品番号、規格などをお知らせください。
- 明記されている価格は「メーカー希望小売価格」です。
- 商品の仕様、価格は2013年2月現在の物です。予告なく、仕様、価格、付属品等を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品は直射日光の当たらない場所で保管して下さい。
- ご使用に際しては使用説明書をよく読み、正しくお使い下さい。
- 装具を選択する際は、医療従事者とご相談ください。



株式会社 ホリスター
東京都港区高輪2-21-38 大野高輪ビル7F 〒108-0074
☎0120-032-950(9:00~17:00 土・祝日・年末年始を除く)
FAX: (03)3280-8862
製造元 Hollister Incorporated



ニューイメージ FFFテープ付

二品系ストーマ装具

装着手順方法

ご使用される方
のための
装着手順方法です。



ニューイメージFFFテープ付 装着方法

ご使用される方が装着する場合


▼下のイラスト・写真はご使用される方の目線です。▼




1 ニューイメージFFFテープ付のリリースフィルムをタブの部分をつまみ、剥がします。(テープ部分は腹部に装着後、剥がします)



2 ニューイメージFFFテープ付の保護剤部分をストーマの最大径よりも少し大きめに手で広げます。

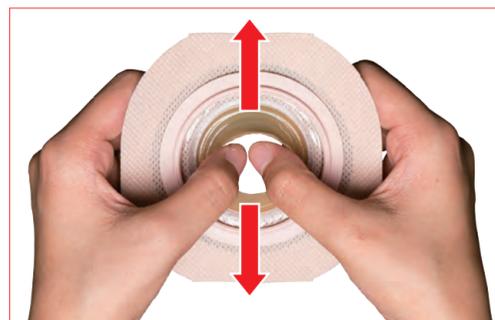


腹部に装着後、ストーマの形に合わせて形を整えるので、**ストーマより少し大きめに広げるのがポイント**です。

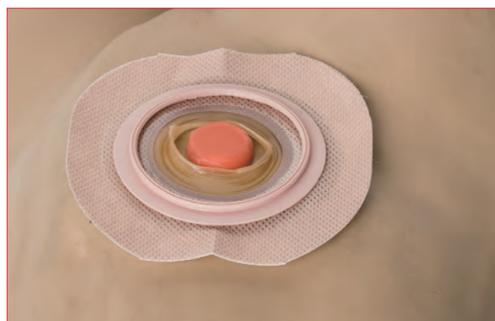

3 腹部に装着します。



ご使用される方から見た角度です。

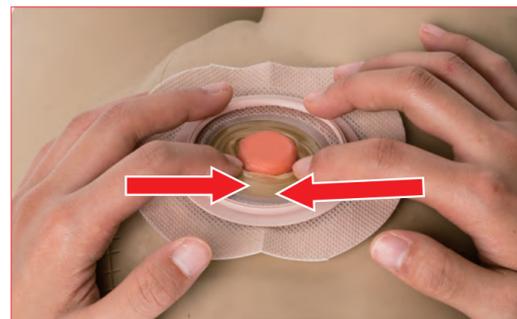

4 装着後ストーマの形に合わせて保護剤部分を指で戻す様にして形を整えます。



5 テープ部分についている剥離紙を左右とも外します。



6 テープ部分を面板の上から押さえてテープを腹部にしっかりと密着させます。



7 装着完了。


お客様からの感想

- はさみを使用せずに使えるので、使いやすい。
- ストーマの形に合わせるのが簡単。
- アクセサリーを使用しなくてよかった。
- 家族がつけてくれるが、つけるのが簡単と好評。



ストーマ袋 装着方法

ご使用される方が装着する場合

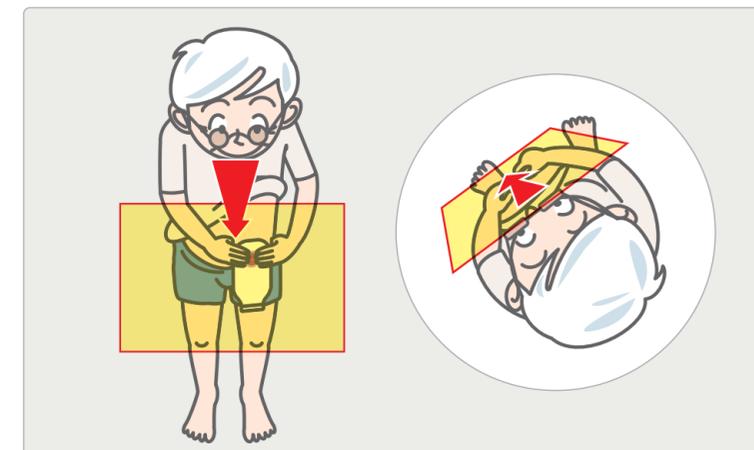

▼下の写真はご使用される方の目線です。▼



1 フランジの吻合部に合わせて、ストーマ袋を装着します。



2 面板とフランジの間に親指を入れ、フランジとストーマ袋をかみ合わせます。(腹部を圧迫せずに装着できます)



3 フランジ部全周に沿ってストーマ袋とフランジをかみ合わせて、しっかりとロックします。



4 全周においてしっかりと吻合しているか、再度確認してください。