

アダプト皮膚保護ペースト

一般情報

- ストーマ周囲の皮膚のしわ、くぼみを補正する練状皮膚保護剤です
- 排泄物の漏れを防ぎ、ストーマ周囲の皮膚を保護します
- アルコールが含まれています

使用方法

1. 面板から剥離紙を剥がし、ストーマ面板孔に、アダプト皮膚保護ペーストを絞りだします (図 1)。
2. 皮膚を洗って水分を完全に拭き取ります。
3. 必要に応じて、アダプト皮膚保護ペーストをストーマ周囲の凸凹部分に塗布します。
4. 面板を貼付します。



アダプト皮膚保護ペースト
製品番号 79300 (60 グラム)
製品番号 79301 (14 グラム)

よくある質問

ペーストは面板の粘着力を高めますか？

アダプト皮膚保護ペーストは、皮膚と面板の間の便もれを防ぎます。これにより、皮膚を保護し、面板貼付を安定させます。アダプト皮膚保護ペーストは粘着剤ではありません。適切な量でご使用ください。

ペーストがストーマに触れた場合、どうしたらよいですか？

アダプト皮膚保護ペーストは、ストーマを損傷したり、排泄に影響することはありません。面板を押し付けると、ストーマ周辺にペーストがはみ出す可能性があります。適正な量でご使用ください。

ストーマ袋に塗布する前にペーストを「しばらく置く」必要がありますか？

これはアルコール含有製品です。チューブから必要量を出したのち、しばらく置いて、アルコールを飛ばしてからご使用ください。

どのようにしてペーストを取り除けばよいですか？

面板を剥離すると、ペーストも一緒に剥がれます。短期間で面板を交換する場合 (1 日以内)、ペーストが皮膚に残る場合がありますが、無理に剥離すると皮膚損傷を起こす可能性がありますので、洗浄後、そのまま新しい面板を貼付していただいても問題ありません。

アダプト皮膚保護ペーストを使用すると、皮膚刺激が起きることがあります。どうしてですか？

アダプト皮膚保護ペーストおよび他のストーマペーストにはアルコール分が含まれており、皮膚刺激がある場合は刺激が起きる場合があります。*アダプト皮膚保護シールはアルコール不使用で、敏感肌または刺激に弱い肌の場合に代用できます。

*ストーマ周囲の皮膚に異常がある場合は、早めに医療従事者にご相談ください。

アダプト皮膚保護ペースト

Ostomy Care
Healthy skin. Positive outcomes.