

アダプト保護膜パック

一般情報

- 粘着剤の剥離による皮膚刺激や排泄物の付着を予防します。
- 低刺激で皮膚にやさしいノンアルコールです。

使用方法

1. 皮膚を洗浄して、清潔で乾いた状態にします。
2. アダプト保護膜パックのパッケージを破って開け、ワイプを取り出します。
3. 保護する皮膚の表面に直接塗布します。
4. 表面が完全に乾燥するまで待ちます。
5. 面板を装着します。



アダプト保護膜パック
製品番号 7917

よくある質問	
アダプト保護膜パックは毎回使用 が必要ですか？	いいえ。アダプト保護膜パックは必須ではありません。 粘着剤の剥離による皮膚刺激や排泄物の付着を予防し、皮膚を保護します。
アダプト保護膜パックを使用すると、 皮膚関連の問題を最小限に抑える ことができますか？	アダプト保護膜パックは低刺激で肌にやさしいノンアルコールの製品です。高い透 湿性を持ち、自然な皮膚呼吸を妨げません。さらにスキンケア成分が配合されて おりますので、効果的な皮膚保護を実現し、皮膚損傷を軽減するのに役立ちます。
アダプト保護膜パックを使用 すると、粘着力を高めることが できますか？	いいえ、アダプト保護膜パックは粘着剤ではありません。皮膚の表面に皮膚を保護 する膜を追加するだけです。

アダプト保護膜パック

引火性: アルコール含有製品です。子供の手の届かないところに保管してください。

Ostomy Care
Healthy skin. Positive outcomes.