


単品系装具

準備物品



ストーマ装具、汚物処理袋、粘着剥離剤、洗浄用微温湯、ティッシュまたは不織布を用意します。必要時: ハサミ、ペン、ストーマゲージ、アクセサリ

面板とストーマ袋の準備

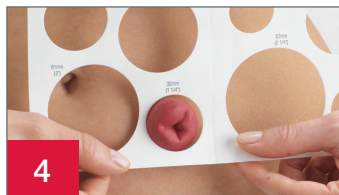

面板を貼付する前に、ストーマゲージを使用して、ストーマのサイズを測定します(プレカットタイプの面板を使用している場合は、ステップ7に進みます)。

使用済みのストーマ装具の除去



排泄物を廃棄します。皮膚をそっと押さえて、面板の外縁部をゆっくりと剥がします。その後下方向に面板を剥がします。必要時、粘着剥離剤を使用します。使用済みの装具を適切に処理します。

皮膚の洗浄および乾燥



石鹸をしっかり泡立て、こすらないように洗浄したのち、微温湯で洗い流します。その後、皮膚を押さえるように拭き取ります。

皮膚の状態の確認




皮膚に問題がないことを確認します。*

*炎症、発疹、発赤がある場合は、医療従事者にご相談ください。



ストーマサイズに合わせて、面板に印をつけます。このときストーマゲージを使用すると簡単に円を描くことができます。

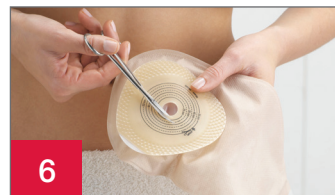

ストーマ剪刀やハサミを使用して、面板につけた印に沿って、カットします。



剥離紙を面板から剥がします。

用手成形皮膚保護剤の追加 (必要な場合)



該当する場合、使用説明書に従って、面板ストーマ孔の周囲に用手成形皮膚保護剤を追加します。

新しいストーマ装具の装着




面板ストーマ孔とストーマの中心を合わせて、面板を貼付します。



約1分間面板をそっと押さえて密着させます。



面板の周囲にテープが付いている場合は、両側の裏紙を剥がし、皮膚にテープ部分を沿わせします。

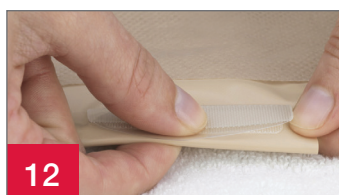

排出口を閉めます。



尿路系装具を使用している場合は、排出バルブが閉じられていることを確認します。排出口(排出量調整口)の涙の形がストーマ袋の身体側に向いている必要があります。

必要に応じて、同梱されているキャップを装着します。

単品系装具

ヒント	製品のリスト	製品番号
- ストーマ周囲の皮膚に、発疹やかぶれがないか確認する必要があります - 皮膚に炎症がある場合は、医療従事者にご相談ください - 用手成形皮膚保護剤やペーストを使用している場合は、医療従事者の指示に従い、ストーマ近接部や面板に追加します - 手術後、ストーマに浮腫がみられる場合があります。ストーマが一定のサイズに縮小するまでに、数週間または数か月かかる場合があります - ストーマを洗浄する際、わずかに出血する場合があります	単品系装具	_____
	アクセサリ	_____
	用手成形皮膚保護剤	_____
	ストーマベルト	_____
	ペースト	_____
	消臭潤滑剤	_____
	ストーマパウダー	_____
	その他 _____	_____

その他の説明

皮膚の水分を十分に拭き取ってから、面板を貼付してください。

使用する前に、使用目的、禁忌、警告、注意事項、および使用方法について使用説明書を必ずお読みください。

CE すべての製品にCEマークが付いているわけではありません。

Hollister のロゴ、ロックンロール、および「健康な肌から、より良い毎日を支える。」は Hollister Incorporated の商標です。
© 2020 Hollister Incorporated.

Hollister Incorporated
〒140-0002
東京都品川区東品川2-2-8
スフィアタワー天王洲21階
株式会社ホリスター

www.hollister.com