


二品系装具

準備物品



ストーマ装具、汚物処理袋、粘着剥離剤洗浄用微温湯、ティッシュまた不織布を用意します。必要時: ハサミ、ペン、測定ゲージ、アクセサリ。

面板とストーマ袋の準備

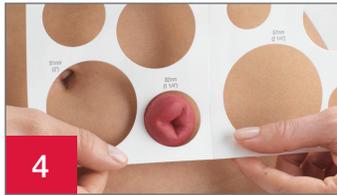

面板を貼付する前に、ストーマゲージを使用して、ストーマのサイズを測定します(プレカットタイプの面板を使用している場合は、ステップ7に進みます)。

使用済みのストーマ装具の除去



排泄物を廃棄します。皮膚をそっと押さえて、面板の外縁部をゆっくりと剥がします。その後下方方向に面板を剥がします。必要時、粘着剥離剤を使用します。使用済みの装具を適切に処理します。

皮膚の洗浄および乾燥



石鹸をしっかり泡立て、こすらないように洗浄したのち、微温湯で洗い流します。その後、皮膚を抑えるように拭き取ります。

皮膚の状態の確認



皮膚に問題がないことを確認します。*

*炎症、発疹、発赤がある場合は、医療従事者にご相談ください。



ストーマサイズに合わせて、面板に印をつけます。このときストーマゲージを使用すると簡単に円を描くことができます。



ストーマ剪刀やハサミを使用して、面板につけた印に沿って、カットします。



剥離紙を面板から剥がします。

用手成形皮膚保護剤の追加 (必要な場合)



該当する場合、使用説明書に従って、面板ストーマ孔の周囲に用手成形皮膚保護剤を追加します。

新しいストーマ装具の装着




面板ストーマ孔とストーマの中心を合わせて、面板を貼付します。



約1分間面板をそっと押さえて密着させます。



フランジ部分を固定し、ストーマ袋を取り付けます。正しく取り付けている場合は、“パチッ、パチッ”という音がします。“パチッ”という音がしなくなったら、ストーマ袋は固定されています。

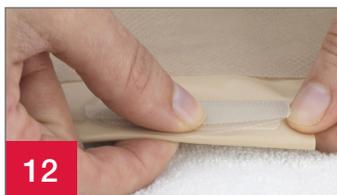

排出口を閉めます。消化管開放型装具を使用している場合は、ストーマ袋の下部にあるロックンロール マイクロシールを閉じるか、ドレイン ストッパーを装着します。



尿路用装具を使用している場合は、排出口が閉じられていることを確認します。排出口の涙の形がストーマ袋の身体側に向いている必要があります。

必要に応じて、同梱されているキャップを装着します。

二品系装具

ヒント	製品のリスト	製品番号
<ul style="list-style-type: none">• ストーマ周囲の皮膚に、発疹やかぶれがないか確認する必要があります• 皮膚に炎症がある場合は、医療従事者にご相談ください• 用手成形皮膚保護剤やペーストを使用している場合は、医療従事者の指示に従い、ストーマ近接部や面板に追加します• 手術後、ストーマに浮腫がみられる場合があります。ストーマが一定のサイズに縮小するまでに、数週間または数か月かかる場合があります。• ストーマを洗淨する際、わずかに出血する場合があります	二品系装具	
	面板	_____
	ストーマ袋	_____
	アクセサリ	
	用手成形皮膚保護剤	_____
	ストーマベルト	_____
	ペースト	_____
	消臭潤滑剤	_____
	ストーマパウダー	_____
	その他 _____	_____

その他の説明

製品のお問い合わせやご注文に際しては、品名、製品番号、規格などをお知らせください。

製品は直射日光の当たらない涼しい場所で保管してください。

ご使用に際しては使用説明書をよく読み、正しくお使いください。

装具を選択する際は、医療従事者にご相談ください。

ご使用に際しては使用説明書をよく読み、正しくお使いください。

CE すべての製品にCEマークが付いているわけではありません。

Hollister のロゴ、ロックンロール、および「健康な肌から、より良い毎日を支える。」は Hollister Incorporated の商標です。

© 2020 Hollister Incorporated.

Hollister Incorporated

〒140-0002

東京都品川区東品川2-2-8

スフィアタワー天王洲21階

株式会社ホリスター

www.hollister.com