



ホリスター 総合製品カタログ

Vol.13



選べる
面板



選べる
スチーム袋



豊富な
アクセサリ

ホリスターであれば、状況にあわせた装具が選べます。

実は各国同じ！

日常生活の中で抱えるニーズ

No.1 排泄物が
漏れない



No.2 皮膚の
健康が保てる



No.3 使いやすい



No.4 臭いが漏れない



No.5 装着時の快適さ



ホリスターの 個別ケア

選べる
面板



選べる
ストーマ袋



豊富な
アクセサリ

ホリスター社 各国顧客調査 2015より
(調査対象：日本／アメリカ／イギリス／ドイツの消化管用ストーマ保有者（術後平均 3.98 年）及び
WOCN/ET などストーマケアに関わる看護師)

状況にあわせてお選びいただける、下記シリーズをご用意しております。

単品系装具

モデルマフレックス

ストーマ袋と面板が一体



二品系装具

ニューイメージ

ストーマ袋と面板を組み合わせる



アクセサリ

アダプト

装具を適切に装着するための補助製品



目次

皮膚保護剤 早見表	P05
選択フローチャート	P07
単品系装具 モデルマフレックスシリーズ	P10
面板の特長	P11
ストーマ袋の特長	P13
消化管用（開放型、閉鎖型）	P15
消化管用（キャップ式）	P27
尿路用	P28
二品系装具 ニューイメージシリーズ	P34
面板の特長	P35
ストーマ袋の特長	P37
面板 消化管用・尿路用共通	P39
ストーマ袋 消化管用（開放型、閉鎖型）	P47
ストーマ袋 消化管用（キャップ式）	P51
ストーマ袋 尿路用	P52
アクセサリ アダプトシリーズ	P54
尿路用関連製品	P64
お子さま用装具 パウチキンシリーズ	P68
その他製品	P72
カラヤシリーズ	P73
二品系装具 ぴたりんシリーズ	P75
単品系装具 しなやかシリーズ	P78
カテゴリー別索引	P83
製品番号順索引	P90
ロックンロール マイクロシールの閉鎖方法/排出方法	P95
テープ付皮膚保護剤 テープ裏紙のはがし方のコツ	P96

皮膚保護剤 早見表

皮膚保護剤は、装着期間や使い方に応じて4つのタイプをご用意しております。
装具をお選びの際は、まずはじめにどの皮膚保護剤が適切かをお選びいただく
ことをおすすめします。

※詳細は各製品ページにてご確認ください。
※テープ無は全面皮膚保護剤、テープ付はテープ付皮膚保護剤になります。

SF
1▶4日間

肌ストレスの少ないやさしいケアが必要な時に
ソフトフレックス皮膚保護剤

単品系装具
モデルマ
フレックス

ラインアップ

コロストミー有

イレオストミー無

ウロストミー有

二品系装具
ニュー
イメージ

ラインアップ

コロストミー有

イレオストミー有

ウロストミー有

平面凸面

テープ無

お好みカットプレカット

FT
4▶7日間

特に耐久性が必要な時に
フレックステンド皮膚保護剤

単品系装具
モデルマ
フレックス

ラインアップ

コロストミー有

イレオストミー^{*1}有

ウロストミー有

二品系装具
ニュー
イメージ

ラインアップ

コロストミー有

イレオストミー有

ウロストミー有

平面やわらかい凸面凸面

テープ付テープ付テープ付

お好みカットプレカットお好みカットプレカットお好みカットプレカット

平面凸面

テープ付テープ無テープ付テープ無

お好みカットプレカットお好みカットプレカットお好みカットプレカット

^{*1}イレオストミー用の製品（キャップ式排出口）は、「平面・お好みカット」のみのご用意です。
^{*2}「やわらかい凸面」は、コロストミー用の製品のみのご用意です。

FW
3▶5日間

肌への負担と耐久性のバランスを取りたい時に
フレックスウェア皮膚保護剤

単品系装具
モデルマ
フレックス

ラインアップ

コロストミー有

イレオストミー無

ウロストミー^{*}有

二品系装具
ニュー
イメージ

ラインアップ

コロストミー有

イレオストミー有

ウロストミー有

平面やわらかい凸面凸面

テープ付テープ付テープ付

お好みカットプレカットお好みカットプレカットお好みカットプレカット

平面凸面

テープ付テープ無テープ付テープ無

お好みカットプレカットお好みカットプレカットお好みカットプレカット

^{*}ウロストミー用の製品は、「やわらかい凸面」のみのご用意です。

FF
3▶5日間

ストーマのかたちにあわせて自由に成形したい時に
フォームフレックス皮膚保護剤

“シェイプフィット（成形可能）”の
皮膚保護剤です。

フォームフレックス皮膚保護剤を採用したことにより、
形状をストーマに合わせて成形することが可能です。
ハサミ等を使用する事なく、手を使ってサイズや形の
調整が行えます。

二品系装具
ニュー
イメージ

ラインアップ

コロストミー有


イレオストミー有

ウロストミー有

平面

テープ付

シェイプフィット

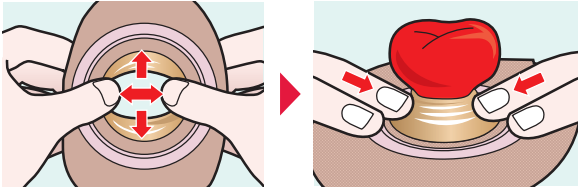


05

06


選択フローチャート

ひとりひとり、それぞれのストーマに合ったストーマ装具が見つかるように
豊富な製品ラインアップをご用意しています。

ストーマ装具の選び方チャートで簡単にお選びいただけます

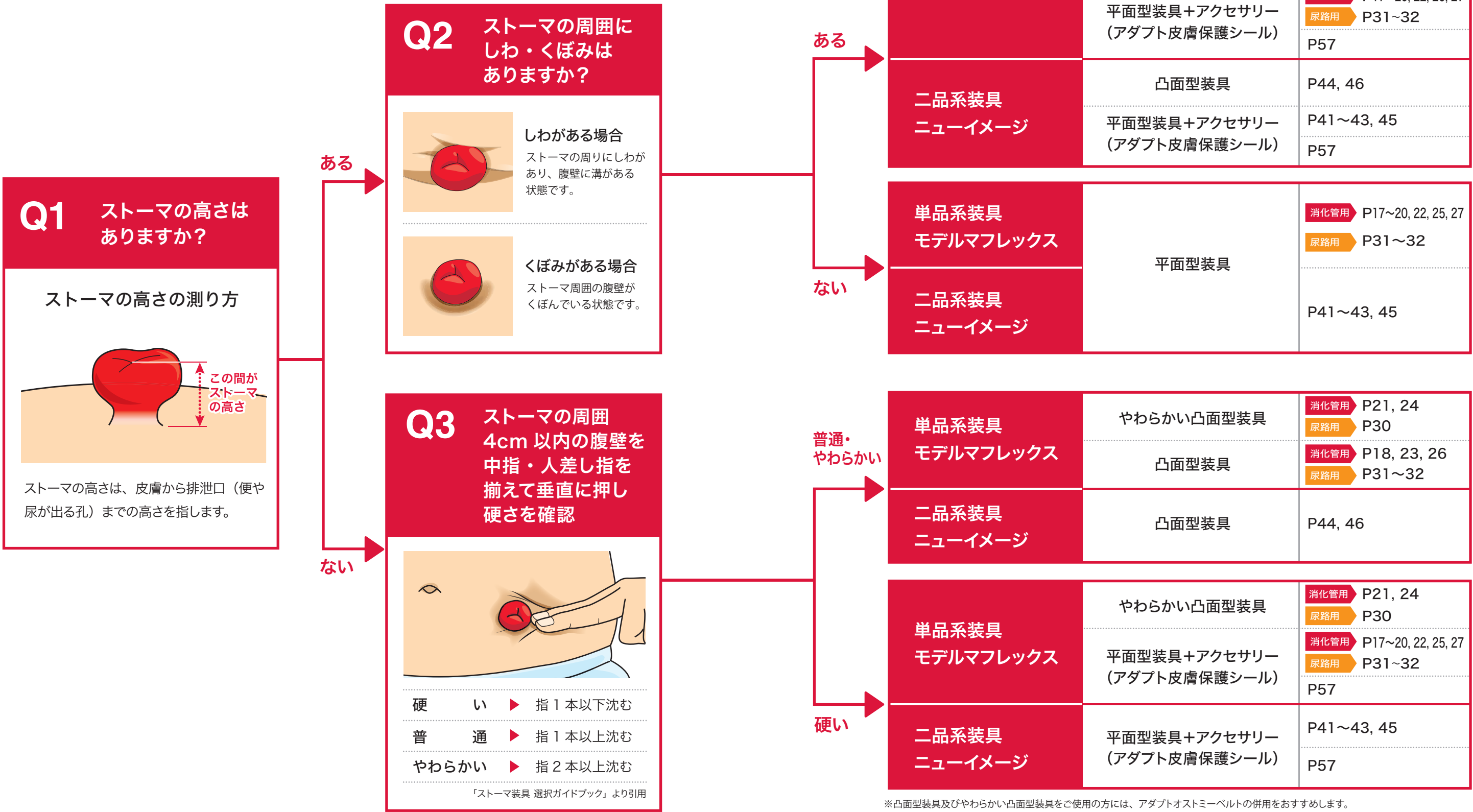

※凸面型装具及びやわらかい凸面型装具をご使用の方には、アダプトオストミーベルトの併用をおすすめします。
※実際に装具を選択される際は、医療従事者の指示に従ってください。

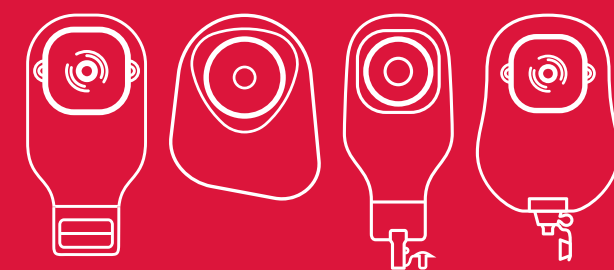

単品系装具
モデルマフレックス
シリーズ

面板の特長

選べる皮膚保護剤

皮膚保護剤には、装着期間や使い方に応じて 3 つのタイプをご用意しています。
いずれも高い緩衝能力で、排泄物等に対して優れたpHコントロールを発揮します。

SF

1・4日間

肌ストレスの少ないやさしいケアが必要な時に
ソフトフレックス皮膚保護剤

新生児にも使える低刺激性を実現。
デリケートな肌や頻回交換を望まれる方等に。

溶解タイプ／分類：CPFB 系
主成分：CMC、ペクチン、ゼラチン、PIB、コットンファイバー

基材ポリイソブチレン (PIB)

コットン
ファイバー 疎水性
ポリマー 親水性
コロイド

FW

3・5日間

肌への負担と耐久性のバランスを取りたい時に
フレックスウェア皮膚保護剤

優れた皮膚保護性と耐久性を実現。
消化管用 / 尿路用を問わず様々な方に。

膨潤タイプ／分類：CPBE 系
主成分：CMC、ペクチン、PIB、EVA

基材ポリイソブチレン (PIB)

クロスリンク 疎水性
ポリマー 親水性
コロイド

FT

4・7日間

特に耐久性が必要な時に
フレクステンド皮膚保護剤


高い耐水性を実現。
水様性の排泄物や装着期間の延長を望まれる方等に。

膨潤タイプ／分類：CPBS 系
主成分：CMC、ペクチン、PIB、SIS

基材ポリイソブチレン (PIB)

クロスリンク 疎水性
ポリマー 親水性
コロイド

豊富な面板

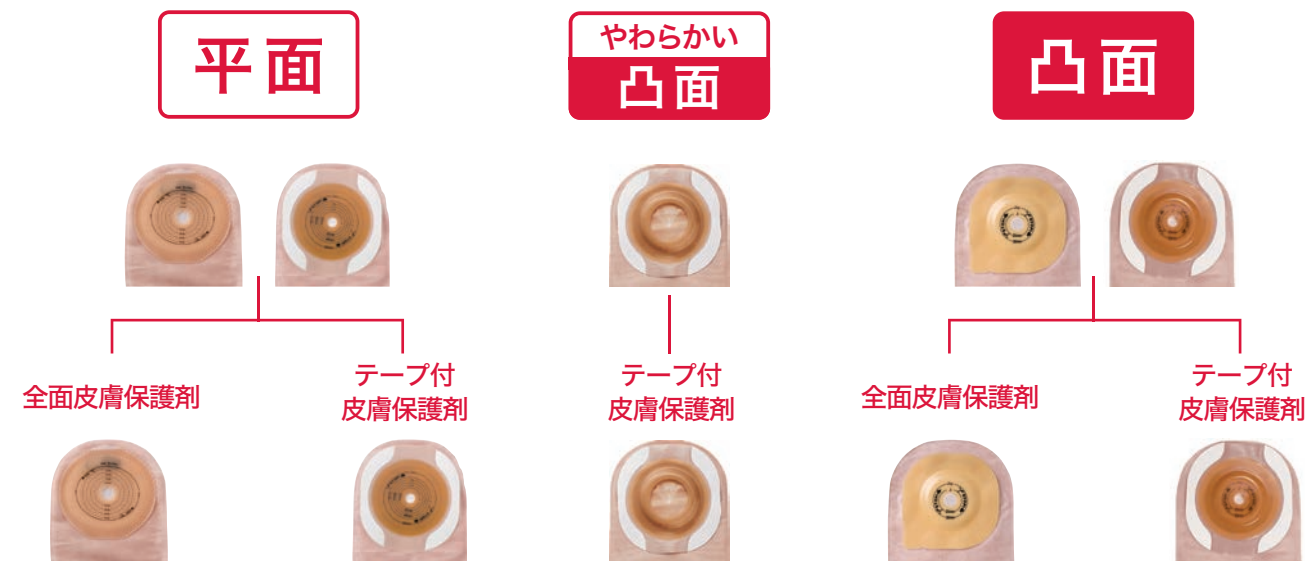

選べる凸面

やわらかい凸面

やわらかい凸面型面板

凸面

凸面型面板

6mmのやわらかい凸面があらゆる身体の動きに吸いつくように密着します。様々な腹壁の状態にもびたと追従するため、漏れを予防し、安心感を高めます。

コンベックスインサートが面板に内蔵されており、高さのないストーマや、しわやくぼみのあるストーマ周囲の皮膚への密着を高めます。凸面の高さは4.16mmで汎用性のある中程度の圧をストーマ周囲にもたらし、排泄物の潜り込みを防ぎ、耐久性を助長します。

密着をサポートするテープ付皮膚保護剤

伸縮性テープ

アクリル系の素材を使用した通気性に優れたテープです。
伸縮性に富み、体のラインにしっかり密着します。

特長 1

外縁部のめくり上がりを抑え漏れを防ぐ

● テープ部分が、ヘルニアやたいこ腹、深いしわにもしっかり追従し漏れを防ぎます。

特長 2

より狭い面積で装着可能

全面皮膚保護剤の接皮面積

伸縮性テープ皮膚保護剤（プレカット）の接皮面積

● 腹壁の状況（瘢痕、骨、しわなど）で装着面積に制限がある場合に、より狭い面積で装着できます。
● 皮膚保護剤が鼠蹊部にかからないように使用可能です。

※伸縮性テープ裏紙のはがし方のコツを、P96 に掲載しております。

テーパードット形状

皮膚保護剤の外縁部が中心部よりも薄いので、外縁部からの皮膚保護剤の浮き上がりを防ぎ、体のラインにしっかり密着します。

クッションフィットバックフィルム

凸面型詰め込み具を包んでクッションの役割を果たし、ストーマとストーマ周囲皮膚を保護します。柔軟性と伸縮性に優れ、皮膚保護剤の密着をサポートします。

エアースペース

皮膚保護剤周囲のくぼみ（エアースペース）が皮膚への接着面積を最小にします。皮膚にあるくぼみの位置が装着の度に変わりますので、装具装着時も皮膚に休息を与える事が可能です。


※各アイコンは本カタログに掲載している製品それぞれの特長を表しています。お選びいただく目安としてご活用ください。

ストーマ袋の特長

消化管用


入浴や水泳の際にシール不要

AF AF300
オストミーフィルター

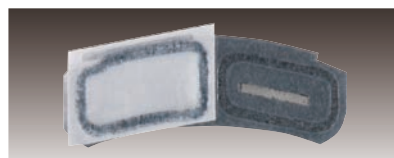

最先端の技術を用いたフィルターです。
入浴や水泳の際にもシールを貼る必要がありません。

フィルターの仕組み

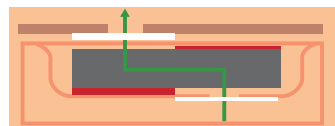


活性炭を使用し、優れた消臭効果を発揮します。
空気以外は通さないで、入浴も可能です。

ストーマ袋フィルム	半透過性膜
プラスチックフィルム	水を通さない膜
活性炭	ガスの流れ

**ロックンロール
マイクロシール**

小さな突起のかみ合わせにより、ストーマ袋の裾を閉鎖します。3 回巻き上げてから、セキュリティフラップをかぶせて閉鎖します。
※使い方の詳細は P95 をご参照ください。

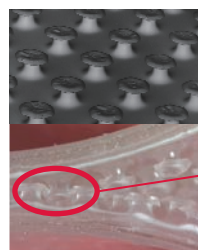

小さい突起のかみ合わせ
により排出口をしっかり
閉じます。



セキュリティフラップ
をかぶせて確実に閉鎖
します。

**ウルトラクリア
フィルム**

ストーマやストーマ周囲皮膚の観察が
容易な、非常に透明度の高いフィルム
です。


**防臭しなやか
フィルム**



ホリスター独自の 4 層構造フィルム
です。防臭性と防音性の高いフィル
ムが排泄物のにおいや漏れを防ぎ、
不快なカサコソ音を軽減します。

尿路用

逆流防止機構

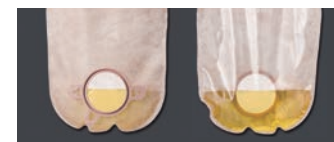

ストーマ袋内に貯留した尿が逆流しな
い構造になっており細菌感染のリスク
を減らします。

目立たない

マルチチャンバー構造により 3 方向
へ尿を均一に分散し膨らみを軽減しま
す。目立ちにくく、チャブチャブ音を軽
減します。

肌様不織布



柔らかく肌触りのよい肌色の不織布で
す。シャワーや入浴後はタオル等で水
分を拭き取ることでサラッと快適に使え
ます。

ベルトタブ



アダプトオストミーベルト（別売）と併用
することにより、装具の密着度を高めるこ
とができます。

**排出量調整口
（ウロストミー）**



排出量を簡単に調整でき、回腸導管の
粘液などもスムーズに排出できます。大
きな **○** を目で見で指で触って排出量調
整口の開閉を確認できます。

痛くない

やわらかく丸みを帯びた排出量調整口の
ため鼠蹊部への違和感を軽減します。

※各アイコンは本カタログに掲載している製品それぞれの特長を表しています。お選びいただく目安としてご活用ください。



単品系装具 モデルマフレックス

消化管用 一覧

SF ソフトフレックス皮膚保護剤

装着期間の目安 1 ▶ 4 日間

モデルマフレックス SF ロックンロール				
	平面	 お好み カット	 ✂ 15→55mm	→ P17
			 25mm 30mm 35mm 40mm	
モデルマフレックス SF 凸面ロックンロール				
	凸面	 お好み カット (透明のみ)	 ✂ 15→38mm ✂ 15→51mm	→ P18
		 フレ カット (透明のみ)	 25mm 30mm 35mm	
モデルマフレックス SF ロックンロール オーバル				
	平面	 お好み カット	 ✂ 15→65×75mm	→ P18
モデルマフレックス SF ロックンロール ミニ肌				
	平面	 お好み カット (肌色のみ)	 ✂ 15→55mm	→ P19
		 フレ カット (肌色のみ)	 25mm 30mm 35mm	
モデルマフレックス SF クローズ				
	平面	 お好み カット	 ✂ 15→55mm	→ P20
		 フレ カット (肌色のみ)	 25mm 30mm 35mm 40mm	




FW フレックスウェア皮膚保護剤

装着期間の目安 3 ▶ 5 日間

やわびた / やわびた 素肌				
	やわらかい 凸面 テープ付	 お好み カット	 15→ 25mm  15→ 38mm  15→ 55mm	→ P21
			20mm 25mm 30mm 35mm 40mm	
モデルマフレックス FW ロックンロール				
	平面 テープ付	 お好み カット	 13→64mm	→ P22
			20mm 25mm 30mm 35mm 40mm	
モデルマフレックス FW 凸面ロックンロール				
	凸面 テープ付	 お好み カット	 13→38mm  13→51mm	→ P23
			20mm 25mm 30mm 35mm 40mm 45mm (透明のみ)	

FT フレックステンド皮膚保護剤

装着期間の目安 4 ▶ 7 日間

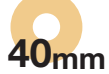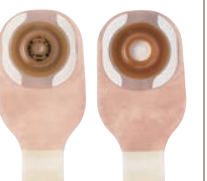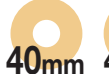やわびた FT / やわびた FT 素肌				
	やわらかい 凸面 テープ付	 お好み カット	 ✂ 13→25mm  ✂ 13→38mm  ✂ 13→55mm	→ P24
		 フレ カット (肌色のみ)	 25mm  29mm  32mm  38mm  44mm	
モデルマフレックス FT ロックンロール				
	平面 テープ付	 お好み カット (ウルトラクリアのみ)	 ✂ 13→64mm	→ P25
		 フレ カット (透明のみ)	 20mm  25mm  30mm  35mm  40mm	
モデルマフレックス FT 凸面ロックンロール				
	凸面 テープ付	 お好み カット (透明のみ)	 ✂ 13→38mm  ✂ 13→51mm	→ P26
		 フレ カット (透明のみ)	 20mm  25mm  30mm  32mm  35mm  40mm  45mm	
モデルマフレックス FT イレオストミーパウチ				
	平面 テープ付	 お好み カット (ウルトラクリアのみ)	 ✂ 13→64mm	→ P27

単品系装具 モデルマフレックスシリーズ

面
板
の
特
長

ス
ト
ー
マ
袋
の
特
長

消
化
管
用
開
放
型
・
閉
鎖
型

消
化
管
用
キ
ャ
ッ
プ
式

尿
路
用



消化管用 開放型

SF
1・4 日間

ソフトフレックス皮膚保護剤

モデルマフレックス SF ロックンロール

平面

- ・新生児にも使える低刺激性
- ・エアースペースにより装着時の皮膚の休息を実現
- ・高性能 AF300 オストミーフィルター内蔵



エアー
スペース



AF AF300
オストミー
フィルター



ロックン
ロール
マイクロ
シール



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
28400	15～55mm	10.3×10cm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	5,000 円 (非課税)



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
28425	25mm	10.3×10cm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	5,000 円 (非課税)
28430	30mm				
28435	35mm				
28440	40mm				



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
28300	15～55mm	10.3×10cm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	5,000 円 (非課税)



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
28325	25mm	10.3×10cm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	5,000 円 (非課税)
28330	30mm				
28335	35mm				
28340	40mm				



消化管用 開放型

SF
1・4 日間

ソフトフレックス皮膚保護剤

モデルマフレックス SF 凸面ロックンロール

凸面

- ・汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止
- ・新生児にも使える低刺激性
- ・高性能 AF300 オストミーフィルター内蔵
- ・コンベックスインサートを包みクッションの役割をはたすバックングフィルム



クッション
フィット
バックング
フィルム



AF AF300
オストミー
フィルター



ロックン
ロール
マイクロ
シール



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



ベルトタブ



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
26900	15～38mm	10.7×10.5cm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	8,800 円 (非課税)
26901	15～51mm				



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
26925	25mm	10.7×10.5cm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	8,800 円 (非課税)
26930	30mm				
26935	35mm				
26935	35mm				

モデルマフレックス SF ロックンロール オーバル

平面

- ・最大 65×75mm までカット可能
- ・新生児にも使える低刺激性
- ・エアースペースにより装着時の皮膚の休息を実現



エアー
スペース



AF AF300
オストミー
フィルター



ロックン
ロール
マイクロ
シール



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
28401	15～65×75mm	10.7×11.7cm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	6,500 円 (非課税)



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
28301	15～65×75mm	10.7×11.7cm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	6,500 円 (非課税)



消化管用 開放型

SF
1・4日間

ソフトフレックス皮膚保護剤

モデルマフレックス SF ロックンロール ミニ肌 平面

- ・小柄な方、入浴、スポーツ用
- ・新生児にも使える低刺激性
- ・エアースペースにより装着時の皮膚の休息を実現



エアースペース



AF300
オストミー
フィルター



ロックン
ロール
マイクロ
シール



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
28100	15～55mm	10.3×10cm	22×14.5cm	30 枚 / 箱	13,500 円 (非課税)



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
28125	25mm	10.3×10cm	22×14.5cm	30 枚 / 箱	13,500 円 (非課税)
28130	30mm				
28135	35mm				



消化管用 閉鎖型

SF
1・4日間

ソフトフレックス皮膚保護剤

モデルマフレックス SF クローズ 平面

- ・小柄な方、入浴、スポーツ用
- ・新生児にも使える低刺激性
- ・エアースペースにより装着時の皮膚の休息を実現



エアースペース



AF300
オストミー
フィルター



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
22500	15～55mm	10.3×10cm	18×15cm	30 枚 / 箱	7,500 円 (非課税)



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
22100	15～55mm	10.3×10cm	18×15cm	30 枚 / 箱	7,500 円 (非課税)



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
22125	25mm	10.3×10cm	18×15cm	30 枚 / 箱	7,500 円 (非課税)
22130	30mm				
22135	35mm				
22140	40mm				



消化管用 開放型

やわぴた

FW
3・5日間

フレックスウェア皮膚保護剤

やわらかい
凸面

- ・やわらかい凸面による優れた追従性
- ・外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- ・優れた皮膚保護性と耐久性



伸縮性
テープ



AF AF300
オストミー
フィルター



ロックン
ロール
マイクロ
シール



ウルトラ
クリア
フィルム



肌様
不織布



ベルトタブ



お好み
カット



ウルトラ
クリア

製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
5691025	15～25mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	9,800 円 (非課税)
5691038	15～38mm	12.7×12.1cm			
5691055	15～55mm				



プレ
カット



ウルトラ
クリア

製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
5691120	20mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	9,800 円 (非課税)
5691125	25mm				
5691130	30mm	12.7×12.1cm			
5691135	35mm				
5691140	40mm				

やわぴた 素肌

FW
3・5日間

フレックスウェア皮膚保護剤

やわらかい
凸面

- ・やわらかい凸面による優れた追従性
- ・外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- ・優れた皮膚保護性と耐久性
- ・素肌のようなカバーで目立ちにくい
- ・切れ目（確認窓）から必要な時だけストーマを確認



伸縮性
テープ



AF AF300
オストミー
フィルター



ロックン
ロール
マイクロ
シール



ウルトラ
クリア
フィルム



肌様
不織布



ベルトタブ



お好み
カット



肌色



確認
窓

製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
5681025	15～25mm	10.8×10.8cm	26×14.5cm	10 枚 / 箱	9,800 円 (非課税)
5681038	15～38mm	12.7×12.1cm			
5681055	15～55mm				



プレ
カット



肌色



確認
窓

製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
5681120	20mm	10.8×10.8cm	26×14.5cm	10 枚 / 箱	9,800 円 (非課税)
5681125	25mm				
5681130	30mm	12.7×12.1cm			
5681135	35mm				
5681140	40mm				



消化管用 開放型

FW
3・5日間

フレックスウェア皮膚保護剤

モデルマフレックス FW ロックンロール

平面

- ・外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- ・優れた皮膚保護性と耐久性
- ・高性能 AF300 オストミーフィルター内蔵



伸縮性
テープ



AF AF300
オストミー
フィルター



ロックン
ロール
マイクロ
シール



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



お好み
カット



透明

製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
58400	13~64mm	12.4×12cm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	6,800 円 (非課税)



プレ
カット



透明

製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
58420	20mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	6,800 円 (非課税)
58425	25mm				
58430	30mm				
58435	35mm				
58440	40mm	12.4×12cm			



お好み
カット



肌色

製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
58300	13~64mm	12.4×12cm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	6,800 円 (非課税)



プレ
カット



肌色

製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
58320*	20mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	6,800 円 (非課税)
58325	25mm				
58330	30mm				
58335	35mm				
58340	40mm	12.4×12cm			

*のついた品番の製品は、セキュリティーフラップの無い右記の仕様になります。（順次切り替え予定）



ロックン
ロール



消化管用 開放型

FW
3・5日間

フレックスウェア皮膚保護剤

モデルマフレックス FW 凸面ロックンロール

凸面

- ・汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止
- ・外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- ・優れた皮膚保護性と耐久性



伸縮性
テープ



AF300
オストミー
フィルター



ロックン
ロール
マイクロ
シール



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



ベルトタブ



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
56700	13～38mm	12.7×12.1cm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	10,800 円 (非課税)
56701	13～51mm				



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
56720	20mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	10,800 円 (非課税)
56725	25mm				
56730	30mm	12.7×12.1cm			
56735	35mm				
56740	40mm				
56745	45mm				



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
56600	13～38mm	12.7×12.1cm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	10,800 円 (非課税)
56601	13～51mm				



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
56625	25mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	10,800 円 (非課税)
56630	30mm	12.7×12.1cm			
56635	35mm				
56640	40mm				



消化管用 開放型

やわぴた FT

FT
4・7日間

フレックステンド皮膚保護剤

やわらかい
凸面

- ・やわらかい凸面による優れた追従性
- ・外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- ・水様性の排泄物にも高い耐水性を発揮



伸縮性
テープ



AF300
オストミー
フィルター



ロックン
ロール
マイクロ
シール



ウルトラ
クリア
フィルム



肌様
不織布



ベルトタブ



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
8574	13～25mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	5 枚 / 箱	4,950 円 (非課税)
8578	13～38mm	12.7×12.1cm			
85711	13～55mm				

※お好みカットのみのご用意となります。

やわぴた FT 素肌

FT
4・7日間

フレックステンド皮膚保護剤

やわらかい
凸面

- ・やわらかい凸面による優れた追従性
- ・外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- ・水様性の排泄物にも高い耐水性を発揮
- ・素肌のようなカバーで目立ちにくい
- ・切れ目（確認窓）から必要な時だけストーマを確認



伸縮性
テープ



AF300
オストミー
フィルター



ロックン
ロール
マイクロ
シール



ウルトラ
クリア
フィルム



肌様
不織布



ベルトタブ



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
8674	13～25mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	5 枚 / 箱	4,950 円 (非課税)
8678	13～38mm	12.7×12.1cm			
86711	13～55mm				



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
8662	25mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	5 枚 / 箱	4,950 円 (非課税)
8663	29mm	12.7×12.1cm			
8664	32mm				
8665	38mm				
8666	44mm				



消化管用 開放型

FT
4・7日間

フレックステンド皮膚保護剤

モデルマフレックス FT ロックンロール

平面

- ・外縁部はテープを採用し、さらなる密着をサポート
- ・水様性の排泄物にも高い耐水性を発揮
- ・ロックンロールマイクロシールで簡単、安全に閉鎖



伸縮性
テープ



ロックン
ロール
マイクロ
シール



ウルトラ
クリア
フィルム



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



ウルトラ
クリア

製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
26700	13~64mm	12.4×12cm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	5,400 円 (非課税)

※ウルトラクリアフィルム使用



透明

製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
26720	20mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	5,400 円 (非課税)
26725	25mm				
26730	30mm				
26735	35mm				
26740	40mm	12.4×12cm			

※防臭しなやかフィルム使用



消化管用 開放型

FT
4・7日間

フレックステンド皮膚保護剤

モデルマフレックス FT 凸面ロックンロール

凸面

- ・汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止
- ・外縁部はテープを採用し、さらなる密着をサポート
- ・水様性の排泄物にも高い耐水性を発揮



伸縮性
テープ



ロックン
ロール
マイクロ
シール



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



ベルトタブ



透明

製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
57900	13~38mm	12.7×12.1cm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	9,200 円 (非課税)
57901	13~51mm				



透明

製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
57920	20mm	10.8×10.8cm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	9,200 円 (非課税)
57925	25mm				
57930	30mm	12.7×12.1cm			
57932	32mm				
57935	35mm				
57940	40mm				
57945	45mm				



消化管用 キャップ式



単品系装具 モデルマフレックス

尿路用 一覧

FT
4・7日間

フレックステンド皮膚保護剤

モデルマフレックス FT イレオストミーパウチ

平面

- ・排出量の多いイレオストミー用
- ・ソフトタップで簡単に排出処理が可能
- ・高性能 AF300 オストミーフィルター内蔵



伸縮性
テープ



AF300
オストミー
フィルター



ウルトラ
クリア
フィルム



肌様
不織布



お好み
カット

ウルトラ
クリア

製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
26064	13～64mm	12.4×12cm	34×14.5cm	10 枚 / 箱	9,600 円 (非課税)

※面板の形状は、平面のみのご用意になります。

FW
3・5日間

フレックスウェア皮膚保護剤

装着期間の目安 3・5日間

やわびた ウロS				
	やわらかい 凸面 テープ付	 (ウルトラクリアのみ)	✂ 15→25mm ✂ 15→38mm ✂ 15→55mm	→ P30
		 (ウルトラクリアのみ)	20mm 25mm 30mm	

SF
1・4日間

ソフトフレックス皮膚保護剤

装着期間の目安 1・4日間

モデルマフレックス SF ウロ S				
	平面	 (透明のみ)	✂ 15→55mm	→ P31
モデルマフレックス SF 凸面 ウロ S				
	凸面	 (透明のみ)	✂ 15→25mm ✂ 15→38mm	→ P31
		 (透明のみ)	20mm 25mm 30mm	

FT
4・7日間

フレックステンド皮膚保護剤

装着期間の目安 4・7日間

モデルマフレックス FT ウロ S				
	平面 テープ付	 お好み カット (透明のみ)	 ✂ 13→64mm	→ P32
		 フレ カット (透明のみ)	 20mm  25mm  30mm  35mm  40mm	
モデルマフレックス FT 凸面 ウロ S				
	凸面 テープ付	 お好み カット (ウルトラクリアのみ)	 ✂ 13→25mm  ✂ 13→38mm	→ P32
		 フレ カット (ウルトラクリアのみ)	 20mm  25mm  30mm  35mm  40mm	

単品系装具 モデルマフレックスシリーズ

面板の特長

ストーマ袋の特長

開放型・閉鎖型
消化管用

消化管用
キャップ式

尿路用

やわらかい凸面 + テープ

やわぴた からウロストミー製品登場!

やわぴた ウロS

やわらかく
なじんで、
ぴたっと
吸いつく。



尿路用

FW
3・5日間

フレックスウェア皮膚保護剤

やわぴた ウロS

2018年夏発売予定

やわらかい
凸面

- ・やわらかい凸面による優れた追従性
- ・外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- ・優れた皮膚保護性と耐久性
- ・使いやすく快適なウロS 排出口



伸縮性
テープ



ウルトラ
クリア
フィルム



肌様
不織布



逆流防止
機構



排出量
調整口



ベルトタブ



お好み
カット



ウルトラ
クリア

製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
2999025	15～25mm	10.8×10.8cm	24.8×14.7cm	10 枚 / 箱	10,800 円 (非課税)
2999038	15～38mm	12.7×12.1cm			
2999055	15～55mm				

※ウロ接続管 S3 本付



プレ
カット



ウルトラ
クリア

製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
2999120	20mm	10.8×10.8cm	24.8×14.7cm	10 枚 / 箱	10,800 円 (非課税)
2999125	25mm				
2999130	30mm	12.7×12.1cm			

※ウロ接続管 S3 本付



尿路用

SF
1・4日間

ソフトフレックス皮膚保護剤

モデルマフレックス SF ウロ S

平面

- ・新生児にも使える低刺激性
- ・エアスペースにより装着時の皮膚の休息を実現
- ・使いやすく快適なウロ S 排出口



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
2959055	15～55mm	10.2×10cm	24.8×14.7cm	10 枚 / 箱	7,800 円 (非課税)

※ウロ接続管 S3 本付

モデルマフレックス SF 凸面 ウロ S

凸面

- ・汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止
- ・新生児にも使える低刺激性
- ・コンベックスインサートを包みクッションの役割をはたすバッキングフィルム
- ・使いやすく快適なウロ S 排出口



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
2939025	15～25mm	10.8×10.8cm	24.8×14.7cm	10 枚 / 箱	10,800 円 (非課税)
2939038	15～38mm				

※ウロ接続管 S3 本付



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
2939120	20mm	10.8×10.8cm	24.8×14.7cm	10 枚 / 箱	10,800 円 (非課税)
2939125	25mm				
2939130	30mm				

※ウロ接続管 S3 本付



尿路用


FT
4・7日間

フレックステンド皮膚保護剤

モデルマフレックス FT ウロ S

平面

- ・外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- ・水様性の排泄物にも高い耐久性を発揮
- ・使いやすく快適なウロ S 排出口

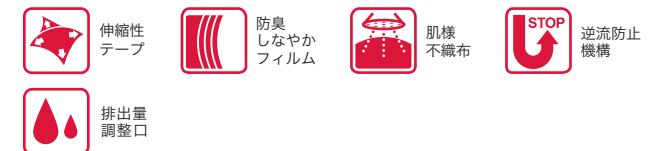

製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
2949064	13～64mm	12×12.7cm	24.8×14.7cm	10 枚 / 箱	9,200 円 (非課税)

※ウロ接続管 S3 本付




製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
2949120	20mm	10.8×10.8cm	24.8×14.7cm	10 枚 / 箱	9,200 円 (非課税)
2949125	25mm				
2949130	30mm				
2949135	35mm				
2949140	40mm	12×12.7cm			

※ウロ接続管 S3 本付

モデルマフレックス FT 凸面 ウロ S

凸面

- ・汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止
- ・外縁部にはテープを採用し、さらなる密着をサポート
- ・水様性の排泄物にも高い耐久性を発揮
- ・使いやすく快適なウロ S 排出口

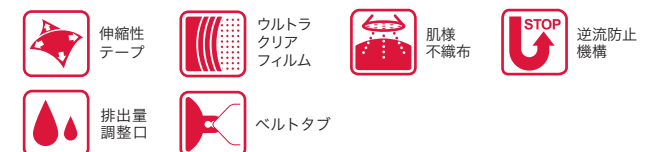


製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
2979025	13～25mm	10.8×10.8cm	24.8×14.7cm	10 枚 / 箱	11,800 円 (非課税)
2979038	13～38mm	12.7×12.1cm			

※ウロ接続管 S3 本付



製品番号	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
2979120	20mm	10.8×10.8cm	24.8×14.7cm	10 枚 / 箱	11,800 円 (非課税)
2979125	25mm				
2979130	30mm	12.7×12.1cm			
2979135	35mm				
2979140	40mm				

※ウロ接続管 S3 本付




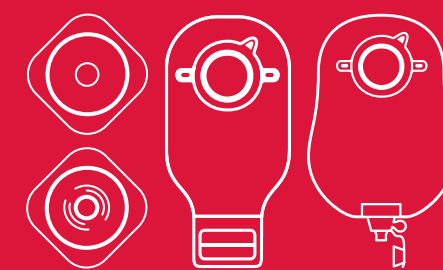


二品系装具
ニューイメージ
シリーズ


面板の特長

選べる皮膚保護剤



皮膚保護剤には、装着期間や使い方に応じて4つのタイプをご用意しています。
いずれも高い緩衝能力で、排泄物等に対して優れたpHコントロールを発揮します。

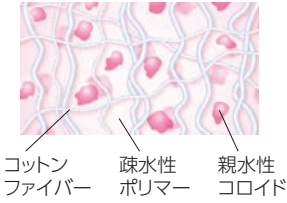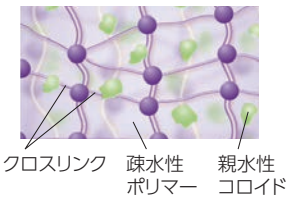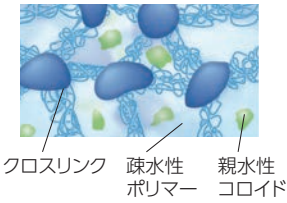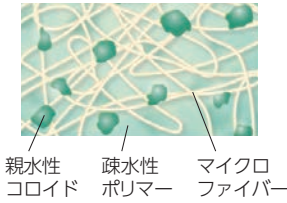SF 1・4 日間	肌ストレスの少ないやさしいケアが必要な時に ソフトフレックス皮膚保護剤 新生児にも使える低刺激性を実現。 デリケートな肌や頻回交換を望まれる方等に。 溶解タイプ／分類：CPFB 系 主成分：CMC、ペクチン、ゼラチン、PIB、コットンファイバー	基材ポリイソブチレン (PIB)  コットン ファイバー 疎水性 ポリマー 親水性 コロイド
FW 3・5 日間	肌への負担と耐久性のバランスを取りたい時に フレックスウェア皮膚保護剤 優れた皮膚保護性と耐久性を実現。 消化管用 / 尿路用を問わず様々な方に。 膨潤タイプ／分類：CPBE 系 主成分：CMC、ペクチン、PIB、EVA	基材ポリイソブチレン (PIB)  クロスリンク 疎水性 ポリマー 親水性 コロイド
FT 4・7 日間	特に耐久性が必要な時に フレックステンド皮膚保護剤 高い耐水性を実現。 水様性の排泄物や装着期間の延長を望まれる方等に。 膨潤タイプ／分類：CPBS 系 主成分：CMC、ペクチン、PIB、SIS	基材ポリイソブチレン (PIB)  クロスリンク 疎水性 ポリマー 親水性 コロイド
FF 3・5 日間	ストーマのかたちにあわせて自由に成形したい時に フォーマフレックス皮膚保護剤 指で自由に成形が可能。 ハサミを使うのが難しい方やマッシュルーム形状の方等に。 膨潤タイプ／分類：CPBM 系 主成分：CMC、ペクチン、フルイド PIB、マイクロファイバー	フルイド(流動性の高い)PIB  親水性 コロイド 疎水性 ポリマー マイクロ ファイバー


豊富な形状

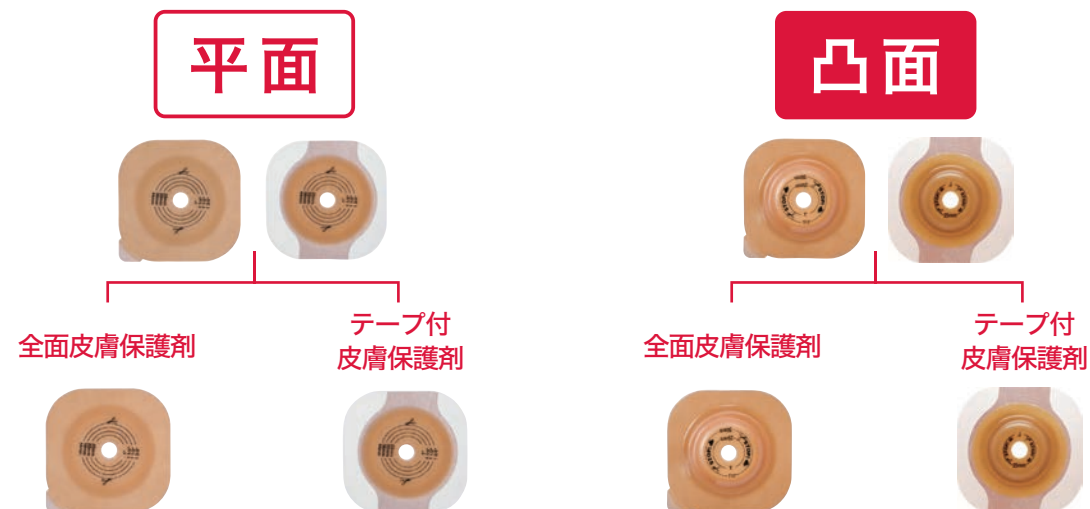


密着をサポートするテープ付皮膚保護剤

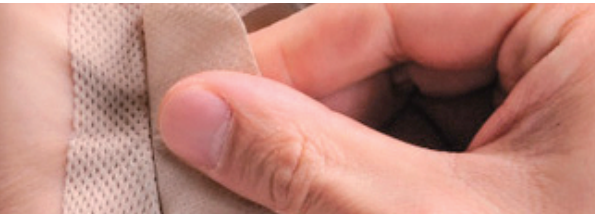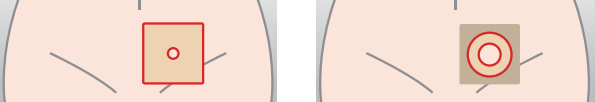 伸縮性テープ	アクリル系の素材を使用した通気性に優れたテープです。 伸縮性に富み、体のラインにしっかり密着します。
特長 1 外縁部のめくり上がりを抑え漏れを防ぐ	特長 2 より狭い面積で装着可能
 テープ部分が、ヘルニアやたいこ腹、深いしわにもしっかり追従し漏れを防ぎます。	 - 腹壁の状況(瘢痕、骨、しわなど)で装着面積に制限がある場合に、より狭い面積で装着できます。 - 皮膚保護剤が鼠蹊部にかからないように使用可能です。
※伸縮性テープ裏紙のはがし方を、P96 に掲載しております。	

圧迫を軽減する浮動型フランジ

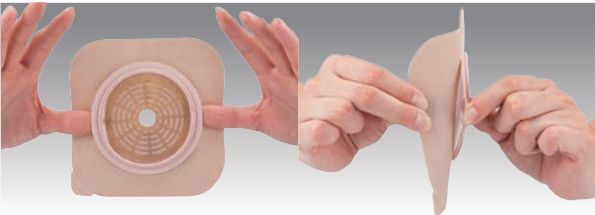 フローティング浮動型フランジ	
面板とフランジの間に指が入るので、手術後の痛みのある腹部を圧迫する事なく装着できます。フランジが浮いているので、面板がとても柔軟で装着時の違和感が軽減できます。	

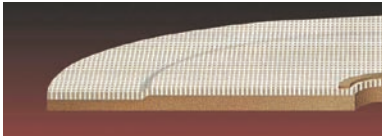凸面 凸面型面板	 超うす型フランジ	 テーパードエッジ形状
 コンベックスインサートが面板に内蔵されており、高さのないストーマや、しわやくぼみのあるストーマ周囲の皮膚への密着を高めます。凸面の高さは4.16mmで汎用性のある中程度の圧をストーマ周囲にもたらし、排泄物の潜り込みを防ぎ、耐久性を助長します。	 面板とストーマ袋を合わせた際のフランジの厚みがとても薄く服の上からでも装具が目立ちにくいです。	 皮膚保護剤の外縁部が中心部よりも薄いので、外縁部からの皮膚保護剤の浮き上がりを防ぎ、体のラインにしっかり密着します。


※各アイコンは本カタログに掲載している製品それぞれの特長を表しています。お選びいただく目安としてご活用ください。

ストーマ袋の特長

消化管用


入浴や水泳の際にシール不要

AF AF300
オストミーフィルター

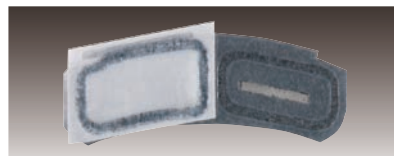

最先端の技術を用いたフィルターです。
入浴や水泳の際にもシールを貼る必要がありません。

フィルターの仕組み

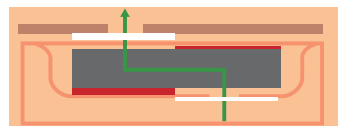


活性炭を使用し、優れた消臭効果を発揮します。
空気以外は通さないで、入浴も可能です。

ストーマ袋フィルム	半透過性膜
プラスチックフィルム	水を通さない膜
活性炭	ガスの流れ

**ロックンロール
マイクロシール**

小さな突起のかみ合わせにより、ストーマ袋の裾を閉鎖します。3 回巻き上げてから、セキュリティフラップをかぶせて閉鎖します。
※使い方の詳細は P95 をご参照ください。

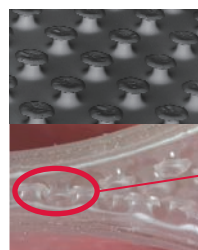

小さい突起のかみ合わせにより排出口をしっかり閉じます。



セキュリティフラップをかぶせて確実に閉鎖します。

**ウルトラクリア
フィルム**

ストーマやストーマ周囲皮膚の観察が容易な、非常に透明度の高いフィルムです。

**防臭しなやか
フィルム**



ホリスター独自の 4 層構造フィルムです。防臭性と防音性の高いフィルムが排泄物のおいや漏れを防ぎ、不快なカサコソ音を軽減します。


肌様不織布



柔らかく肌触りのよい肌色の不織布です。シャワーや入浴後はタオル等で水分を拭き取ることでサラッと快適に使えます。

尿路用

逆流防止機構

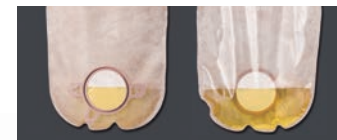

ストーマ袋内に貯留した尿が逆流しない構造になっており細菌感染のリスクを減らします。

目立たない

マルチチャンバー構造により 3 方向へ尿を均一に分散し膨らみを軽減します。目立ちにくく、チャブチャブ音を軽減します。

**センターポイント
ロック**



面板とストーマ袋をかみ合わせることで、安全、確実にロックします。スポーツなどの活動時や就寝時にも安心して使えます。簡単に取り付け、取り外せます。

ベルトタブ



アダプトオストミーベルト（別売）と併用することにより、装具の密着度を高めることができます。

**排出量調整口
(ウロストミー)**



排出量を簡単に調整でき、回腸導管の粘液などもスムーズに排出できます。大きな **○** を目で見で指で触って排出量調整口の開閉を確認できます。

痛くない

やわらかく丸みを帯びた排出量調整口のため鼠蹊部への違和感を軽減します。


※各アイコンは本カタログに掲載している製品それぞれの特長を表しています。お選びいただく目安としてご活用ください。





面板(消化管用・尿路用共通)一覧

FF フォーマフレックス皮膚保護剤					装着期間の目安 3・5日間	
ニューイメージ FFF テープ付 	平面 テープ付		フランジサイズ			
			44mm	57mm	70mm	
			13~32mm	16~43mm	16~57mm	

SF ソフトフレックス皮膚保護剤					装着期間の目安 1・4日間	
ニューイメージ SFF 	平面		フランジサイズ			
			44mm	57mm	70mm	
			13~32mm	13~44mm	13~57mm	
			フランジサイズ			
			44mm	57mm		
			22mm 25mm 29mm 32mm	35mm 38mm		

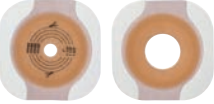FW フレックスウェア皮膚保護剤					装着期間の目安 3・5日間	
ニューイメージ FWF テープ付 	平面 テープ付		フランジサイズ			
			44mm	57mm	70mm	102mm
			13~32mm	13~44mm	13~57mm	0~89mm
			フランジサイズ			
			44mm	57mm		
			16mm 19mm 22mm 25mm 29mm 32mm	35mm 38mm 44mm		
ニューイメージ FWF 	平面		フランジサイズ			
			44mm	57mm	70mm	
			13~32mm	13~44mm	13~57mm	
			フランジサイズ			
			44mm	57mm		
			16mm 19mm 22mm 25mm 29mm 32mm	35mm 38mm		
ニューイメージ FWF 凸面 テープ付 	凸面 テープ付		フランジサイズ			
			44mm	57mm	70mm	
			13~25mm	13~38mm	13~51mm	
			フランジサイズ			
			44mm	57mm		
			22mm 25mm	29mm 32mm		

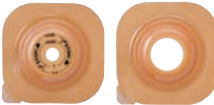FW フレックスウェア皮膚保護剤					装着期間の目安 3・5日間	
ニューイメージ FWF 凸面 	凸面		フランジサイズ			
			44mm	57mm	70mm	
			13~25mm	13~38mm	13~51mm	
			フランジサイズ			
			44mm	57mm		
			22mm 25mm	29mm 32mm		

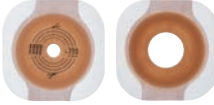FT フレックステンド皮膚保護剤					装着期間の目安 4・7日間	
ニューイメージ FTF テープ付 	平面 テープ付		フランジサイズ			
			44mm	57mm	70mm	102mm
			13~32mm	13~44mm	13~57mm	0~89mm
			フランジサイズ			
			44mm	57mm		
			16mm 19mm 22mm 25mm 29mm 32mm	35mm 38mm 44mm		
ニューイメージ FTF 	平面		フランジサイズ			
			44mm	57mm	70mm	
			13~32mm	13~44mm	13~57mm	
			フランジサイズ			
			44mm	57mm		
			16mm 19mm 22mm 25mm 29mm 32mm	35mm 38mm		
ニューイメージ FTF 凸面 テープ付 	凸面 テープ付		フランジサイズ			
			44mm	57mm	70mm	
			13~25mm	13~38mm	13~51mm	
			フランジサイズ			
			44mm	57mm	70mm	
			16mm 19mm 22mm 25mm	29mm 32mm 35mm 38mm	41mm 44mm 51mm	
ニューイメージ FTF 凸面 	凸面		フランジサイズ			
			44mm	57mm	70mm	
			13~25mm	13~38mm	13~51mm	
			フランジサイズ			
			44mm	57mm		
			22mm 25mm	29mm 32mm		



面板 消化管用・尿路用共通



面板 消化管用・尿路用共通


FF
3・5日間

フォームフレックス皮膚保護剤

ニューイメージ FFF テープ付

平面

- ・ストーマサイズに合わせて成形が可能
- ・外縁部はテープを採用し、さらなる密着をサポート

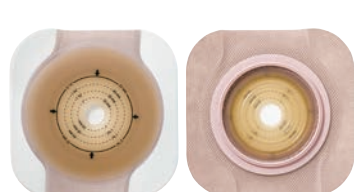


製品番号	成形可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
14102	13~32mm	44mm	10.8×10.8cm	5枚 / 箱	5,400 円 (非課税)
14103	16~43mm	57mm			
14104	16~57mm	70mm	12.8×12.8cm		


フォームフレックス皮膚保護剤の特長

“シェイプフィット(成形可能)”の皮膚保護剤です。

フォームフレックス皮膚保護剤を採用したことにより、形状をストーマに合わせて成形することが可能です。
ハサミ等を使用する事なく、手を使ってサイズや形の調整が行えます。

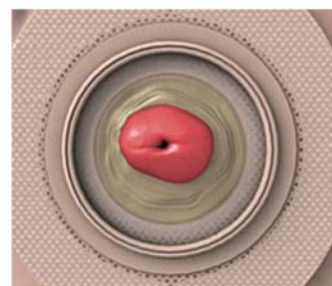

様々な形状のストーマに対応が可能です。

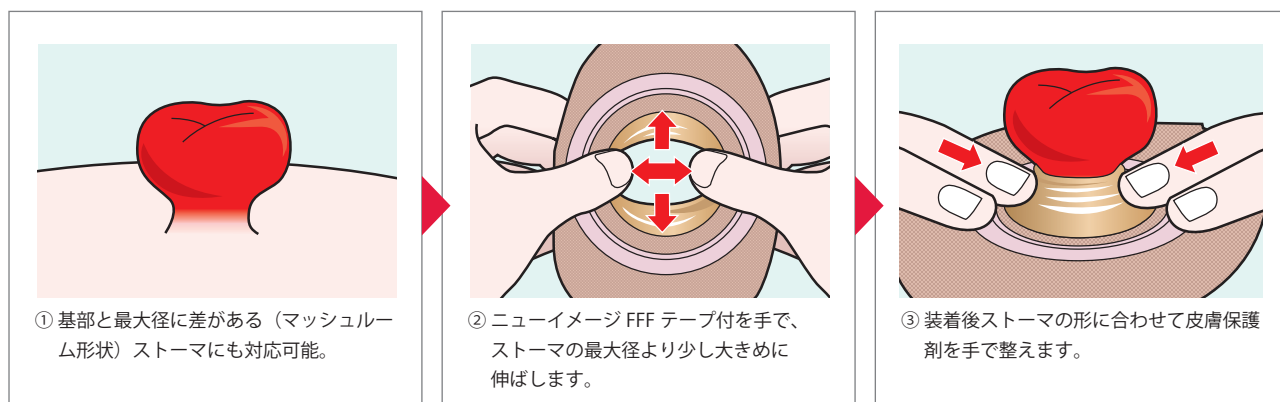


SF
1・4日間

ソフトフレックス皮膚保護剤


ニューイメージ SFF

平面

- ・皮膚に優しく、頻繁に交換する事も可能
- ・コットンファイバー配合により適度な耐久性と剥離刺激の軽減を実現

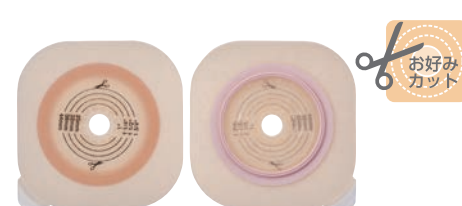

製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
15002	13~32mm	44mm	10.1×10.1cm	5枚 / 箱	3,500 円 (非課税)
15003	13~44mm	57mm			
15004	13~57mm	70mm	12.6×12.6cm		

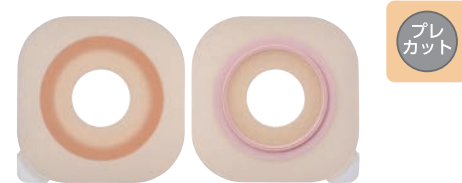

製品番号	既製孔径	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
16503	22mm	44mm	10.1×10.1cm	5 枚 / 箱	3,500 円 (非課税)
16504	25mm				
16505	29mm				
16506	32mm				
16507	35mm	57mm			
16508	38mm				



面板 消化管用・尿路用共通

FW
3・5日間

フレックスウェア皮膚保護剤

ニューイメージ FWF テープ付

平面

- ・外縁部はテープを採用し、密着をサポート
- ・優れた皮膚保護性と耐久性



伸縮性
テープ




浮動型
フランジ



超うす型
フランジ



センター
ポイント
ロック

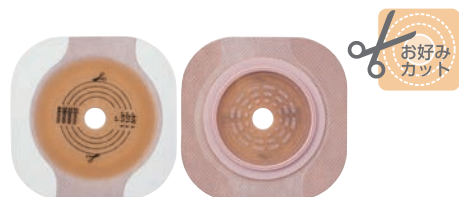

製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
14202	13~32mm	44mm	10.1×10.1cm	5 枚 / 箱	3,500 円 (非課税)
14203	13~44mm	57mm			
14204	13~57mm	70mm			
14206	0~89mm	102mm	15.7×15.7cm		6,500 円 (非課税)

※102mm のみフランジの厚さが異なります。



製品番号	既製孔径	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
14301	16mm	44mm	10.1×10.1cm	5 枚 / 箱	3,500 円 (非課税)
14302	19mm				
14303	22mm				
14304	25mm				
14305	29mm				
14306	32mm				
14307	35mm	57mm			
14308	38mm				
14309	44mm				

ニューイメージ FWF

平面

- ・優れた皮膚保護性と耐久性



浮動型
フランジ




超うす型
フランジ




センター
ポイント
ロック



デーバー
エッジ形状

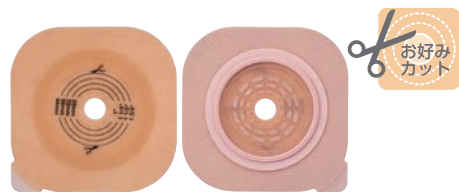

製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
15202	13~32mm	44mm	10.1×10.1cm	5 枚 / 箱	4,400 円 (非課税)
15203	13~44mm	57mm			
15204	13~57mm	70mm	12.6×12.6cm		

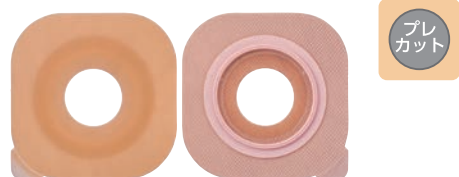

製品番号	既製孔径	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
16401	16mm	44mm	10.1×10.1cm	5 枚 / 箱	4,400 円 (非課税)
16402	19mm				
16403	22mm				
16404	25mm				
16405	29mm				
16406	32mm				
16407	35mm	57mm			
16408	38mm				



面板 消化管用・尿路用共通

FW
3・5日間

フレックスウェア皮膚保護剤

ニューイメージ FWF 凸面テープ付

凸面

- ・汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止
- ・外縁部はテープを採用し、密着をサポート
- ・優れた皮膚保護性と耐久性



伸縮性
テープ



浮動型
フランジ



超うす型
フランジ



センター
ポイント
ロック



製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
13402	13~25mm	44mm	10.2×10.2cm	5 枚 / 箱	4,750 円 (非課税)
13403	13~38mm	57mm	12.7×12.7cm		
13404	13~51mm	70mm			



製品番号	既製孔径	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
13503	22mm	44mm	10.2×10.2cm	5 枚 / 箱	4,750 円 (非課税)
13504	25mm		12.7×12.7cm		
13505	29mm	57mm			
13506	32mm				

ニューイメージ FWF 凸面

凸面

- ・汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止
- ・優れた皮膚保護性と耐久性



浮動型
フランジ




超うす型
フランジ



センター
ポイント
ロック



デーバー
エッジ形状

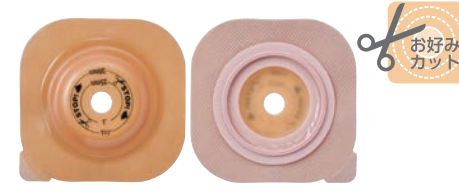

製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
15402	13~25mm	44mm	10.1×10.1cm	5 枚 / 箱	5,400 円 (非課税)
15403	13~38mm	57mm			
15404	13~51mm	70mm	12.6×12.6cm		



製品番号	既製孔径	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
15503	22mm	44mm	10.1×10.1cm	5 枚 / 箱	5,400 円 (非課税)
15504	25mm				
15505	29mm	57mm			
15506	32mm				



面板 消化管用・尿路用共通

FT
4・7日間

フレックステンド皮膚保護剤

ニューイメージ FTF テープ付

平面

- ・外縁部はテープを採用し、密着をサポート
- ・水様性の排泄物にも高い耐水性を発揮



伸縮性
テープ




浮動型
フランジ



超うす型
フランジ




センター
ポイント
ロック

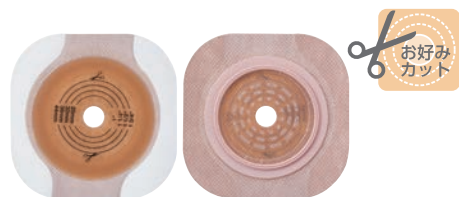

製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
14602	13～32mm	44mm	10.1×10.1cm	5 枚 / 箱	5,400 円 (非課税)
14603	13～44mm	57mm			
14604	13～57mm	70mm			
14606	0～89mm	102mm	15.7×15.7cm		7,500 円 (非課税)

※102mm のみフランジの厚さが異なります。

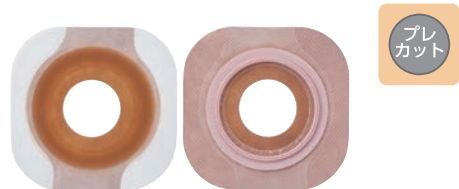

製品番号	既製孔径	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
14701	16mm	44mm	10.1×10.1cm	5 枚 / 箱	5,400 円 (非課税)
14702	19mm				
14703	22mm				
14704	25mm				
14705	29mm				
14706	32mm				
14707	35mm	57mm			
14708	38mm				
14709	44mm				

ニューイメージ FTF

平面

- ・水様性の排泄物にも高い耐水性を発揮



浮動型
フランジ




超うす型
フランジ




センター
ポイント
ロック



テーパー
エッジ形状

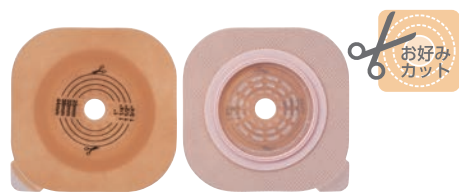

製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
15602	13～32mm	44mm	10.1×10.1cm	5 枚 / 箱	4,950 円 (非課税)
15603	13～44mm	57mm			
15604	13～57mm	70mm	12.6×12.6cm		

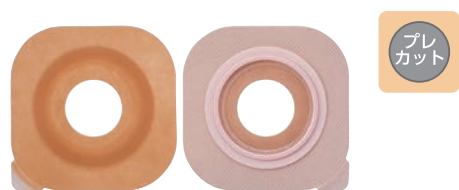

製品番号	既製孔径	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
16101	16mm	44mm	10.1×10.1cm	5 枚 / 箱	4,950 円 (非課税)
16102	19mm				
16103	22mm				
16104	25mm				
16105	29mm				
16106	32mm				
16107	35mm	57mm			
16108	38mm				



面板 消化管用・尿路用共通

FT
4・7日間

フレックステンド皮膚保護剤

ニューイメージ FTF 凸面テープ付

凸面

- ・汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止
- ・外縁部はテープを採用し、密着をサポート
- ・水様性の排泄物にも高い耐水性を発揮



伸縮性
テープ




浮動型
フランジ




超うす型
フランジ



センター
ポイント
ロック

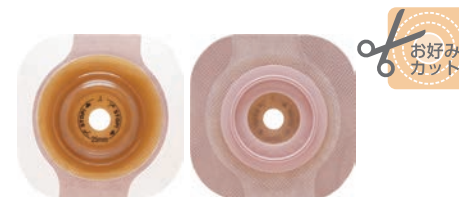

製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
13802	13～25mm	44mm	10.2×10.2cm	5 枚 / 箱	6,400 円 (非課税)
13803	13～38mm	57mm	12.7×12.7cm		
13804	13～51mm	70mm			

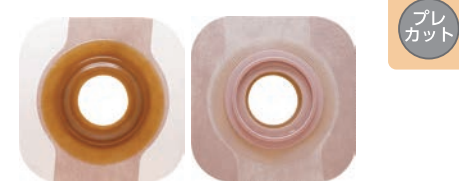

製品番号	既製孔径	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
13901	16mm	44mm	10.2×10.2cm	5 枚 / 箱	6,400 円 (非課税)
13902	19mm				
13903	22mm				
13904	25mm				
13905	29mm	57mm	12.7×12.7cm		
13906	32mm				
13907	35mm				
13908	38mm				
13909	41mm	70mm			
13910	44mm				
13911	51mm				

ニューイメージ FTF 凸面

凸面

- ・汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止
- ・水様性の排泄物にも高い耐水性を発揮



浮動型
フランジ




超うす型
フランジ




センター
ポイント
ロック



テーパー
エッジ形状

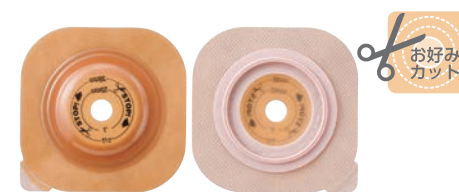

製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
15802	13～25mm	44mm	10.1×10.1cm	5 枚 / 箱	5,950 円 (非課税)
15803	13～38mm	57mm			
15804	13～51mm	70mm	12.6×12.6cm		

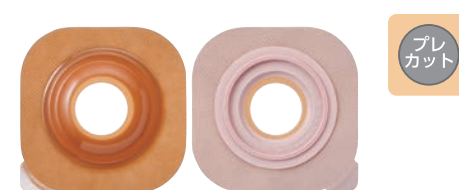

製品番号	既製孔径	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
15903	22mm	44mm	10.1×10.1cm	5 枚 / 箱	5,950 円 (非課税)
15904	25mm				
15905	29mm	57mm			
15906	32mm				



ストーマ袋 消化管用 開放型

ニューイメージ ロックンロール

- ・高性能 AF300 オストミーフィルター内蔵
- ・ロックンロールマイクロシールで簡単、安全に閉鎖



ロックン
ロール
マイクロ
シール



AF AF300
オストミー
フィルター



超うす型
フランジ



センター
ポイント
ロック



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



ベルトタブ



透明

製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
18192	44mm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	3,800 円 (非課税)
18193	57mm			
18194	70mm			



肌色

製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
18182	44mm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	3,800 円 (非課税)
18183	57mm			
18184	70mm			

ニューイメージ ドレイン ロックンロール

- ・ロックンロールマイクロシールで簡単、安全に閉鎖
- ・ウルトラクリアフィルムでストーマの観察が容易



ロックン
ロール
マイクロ
シール



超うす型
フランジ



センター
ポイント
ロック



ウルトラ
クリア
フィルム



肌様
不織布



ベルトタブ



ウルトラ
クリア

製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
18002	44mm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	3,300 円 (非課税)
18003	57mm			
18004	70mm			
18006	102mm	30×18cm		5,000 円 (非課税)

※102mm のみストーマ袋の形状が異なります。



ストーマ袋 消化管用 開放型

ニューイメージ フィルター付 ドレイン

- ・高性能 AF300 オストミーフィルター内蔵
- ・閉鎖にはドレインストッパー肌を使用



AF AF300
オストミー
フィルター



超うす型
フランジ



センター
ポイント
ロック



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



ベルトタブ



透明

製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
18162	44mm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	3,600 円 (非課税)
18163	57mm			
18164	70mm			

※ドレインストッパー肌 1 個付



肌色

製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
18142	44mm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	3,600 円 (非課税)
18143	57mm			
18144	70mm			

※ドレインストッパー肌 1 個付

ニューイメージ ドレイン

- ・閉鎖にはドレインストッパー肌を使用



超うす型
フランジ



センター
ポイント
ロック



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



ベルトタブ



透明

製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
18102	44mm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	2,400 円 (非課税)
18103	57mm			
18104	70mm			

※ドレインストッパー肌 1 個付



肌色

製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
18122	44mm	30×14.5cm	10 枚 / 箱	2,400 円 (非課税)
18123	57mm			
18124	70mm			

※ドレインストッパー肌 1 個付



ストーマ袋 消化管用 開放型

ニューイメージ ロックンロール ミニ

- ・高性能 AF300 オストミーフィルター内蔵
- ・ロックンロールマイクロシールで簡単、安全に閉鎖
- ・小柄な方、入浴、スポーツ用に最適



ロックン
ロール
マイクロ
シール



AF300
オストミー
フィルター



超うす型
フランジ



センター
ポイント
ロック



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



ベルトタブ



透明

製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
18292	44mm	22×14.5cm	20 枚 / 箱	7,000 円 (非課税)
18293	57mm			



肌色

製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
18282	44mm	22×14.5cm	20 枚 / 箱	7,000 円 (非課税)
18283	57mm			

ニューイメージ ミニドレイン肌

- ・閉鎖にはドレインストッパー肌を使用
- ・小柄な方、入浴、スポーツ用に最適



超うす型
フランジ



センター
ポイント
ロック



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



ベルトタブ



肌色

製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
18202	44mm	23×13.5cm	10 枚 / 箱	2,400 円 (非課税)
18203	57mm			

※ドレインストッパー肌 1 個付



ストーマ袋 消化管用 閉鎖型

ニューイメージ ミニクローズ

- ・高性能 AF300 オストミーフィルター内蔵
- ・小柄な方、入浴、スポーツ用に最適



AF300
オストミー
フィルター



超うす型
フランジ



センター
ポイント
ロック



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



ベルトタブ



透明

製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
18382	44mm	18×15cm	30 枚 / 箱	7,800 円 (非課税)
18383	57mm			
18384	70mm			



肌色

製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
18392	44mm	18×15cm	30 枚 / 箱	7,800 円 (非課税)
18393	57mm			
18394	70mm			



ストーマ袋 消化管用 キャップ式

ニューイメー ジ イレオストミーパウチ

- ・排出量の多いイレオストミー用ストーマ袋
- ・ソフトタップで簡単に排出処理が可能



ウルトラ
クリア
フィルム



超うす型
フランジ



センター
ポイント
ロック



肌様
不織布



ベルトタブ



ウルトラ
クリア

製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
18012	44mm	32×18.8cm	10 枚 / 箱	5,000 円 (非課税)
18013	57mm			
18014	70mm			
18016	102mm			7,000 円 (非課税)



ストーマ袋 尿路用

ニューイメー ジ ウロ S

- ・ストーマ袋が均一に膨らむマルチチャンバー構造
- ・開閉がしやすい排出量調整口
- ・やわらかく違和感を軽減した排出量調整口
- ・ウルトラクリアフィルムはストーマの観察が容易



逆流防止
機構



排出量
調整口



超うす型
フランジ



センター
ポイント
ロック



ウルトラ
クリア
フィルム



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



ベルトタブ



ウルトラ
クリア

製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
18922	44mm	24.8×14.7cm	10 枚 / 箱	6,000 円 (非課税)
18923	57mm			
18924	70mm			

※ウロ接続管 S3 本付

※ウルトラクリアフィルム使用



透明

製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
18902	44mm	24.8×14.7cm	10 枚 / 箱	5,900 円 (非課税)
18903	57mm			
18904	70mm			

※ウロ接続管 S3 本付

※防臭しなやかフィルム使用



肌色


製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
18912	44mm	24.8×14.7cm	10 枚 / 箱	5,900 円 (非課税)
18913	57mm			
18914	70mm			

※ウロ接続管 S3 本付

※防臭しなやかフィルム使用



アクセサリー
アダプトシリーズ

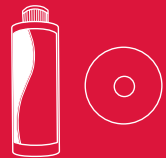

アクセサリー アダプトシリーズ

装具を適切に装着し、より安心・快適に生活を送っていただけるよう生まれた補助製品です。

アダプト消臭潤滑剤 236ml ボトル アダプト消臭潤滑剤 8ml パック



- ・優れた潤滑効果で、簡単にストーマ袋からの排出が可能
- ・高い消臭効果で、排泄物のおいをコントロール
- ・界面活性剤成分がストーマ袋内の清潔を保持
- ・各種消臭ガス抜きフィルターの効果を助長
- ・ストーマ袋にダメージを与えない水様性


製品番号	規 格	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
78500	236ml ボトル	1 本/箱	2,800 円	3,024 円
78501	8ml パック	50 枚/箱	3,800 円	4,104 円

主成分：精製水、プロピレングリコール、ポクロサマー 188NF、N-エチレン
N-SOYA モルホリニウムエンスルフェート、ヒドロオキシエチルセルロース、
オクトキシノール-9、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エチルパラベン、
ブチルパラベン、プロピルパラベン、イソブチルパラベン、水酸化ナトリウム

アダプト消臭潤滑剤 使用方法




ストーマ袋の裾から入れる場合

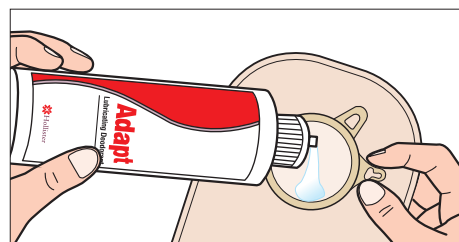


フレンジ部分から入れる場合

アダプト消臭潤滑剤を約 5ml (小さじ 1 杯程度、パックタイプの場合は 1 袋全て) ストーマ袋の中に入れます。

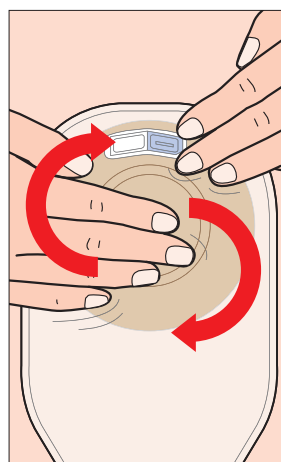

図のようにしてストーマ袋全体にアダプト消臭潤滑剤をなじませてください。この事により袋全体に広がり、より効果的な消臭・潤滑・洗浄が行えます。

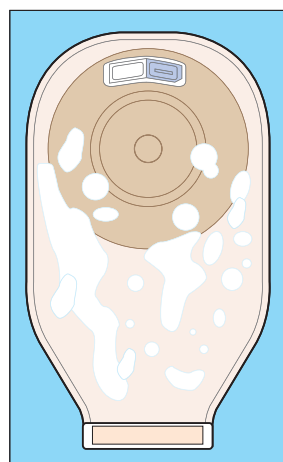


図のようにストーマ袋の中に、泡状のものが確認できれば、アダプト消臭潤滑剤が全体に行き渡っています。この状態になると排泄物が流れやすくなります。




アクセサリー アダプトシリーズ

アダプト消臭潤滑剤の消臭効果 実験結果

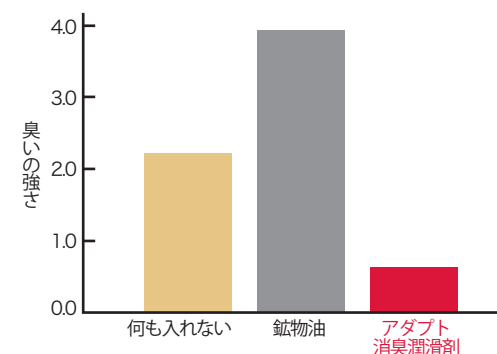


使用者の評価


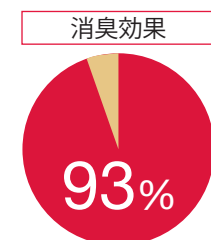


アンケート回答者の 93%の方がアダプト消臭潤滑剤は臭いの問題に対処する性能があると評価。

アダプト消臭潤滑剤の潤滑効果 実験結果

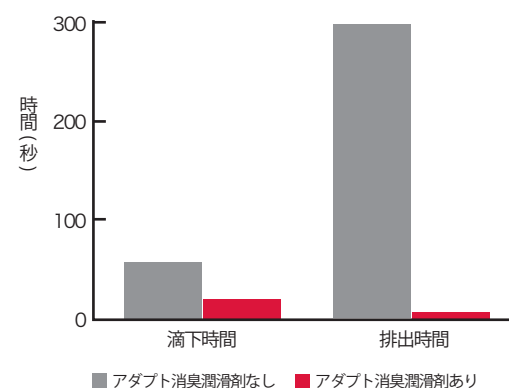

使用者の評価

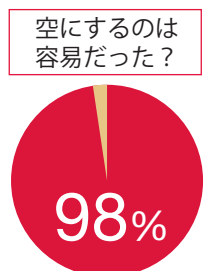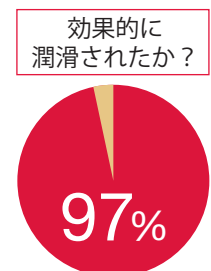

97%の評価者がアダプト消臭潤滑剤はストーマ袋を空にするのを助ける効果的な潤滑剤として評価。評価に参加した 98%の人々は、アダプト消臭潤滑剤が普段よりもストーマ袋を空にするのを容易にすると評価。

アダプト消臭潤滑剤—ストーマ保有者の要求に応える製品実験結果と使用者評価の結果
Richard I. Murahata, Ph.D., Bettakeri Udayakumar, Ph.D., Michael Riemer, B.S., Paris Purnell R.N., S.T.N., and Thomas Nichols, M.S., M.B.A. • Hollister Incorporated, Libertyville, Illinois, USA

m9 消臭スプレー



- ・ポンプスプレータイプの空間消臭剤
- ・優れた消臭効果で装具交換時の便や尿の臭いを軽減
- ・空中に 2 ～ 3 回噴霧して使用（必要に応じて回数を増やして下さい。直接ストーマや肌に向けての使用はおやめ下さい）
- ・無香料


製品番号	規 格	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
7732	60ml ボトル	1 本/箱	1,400 円	1,512 円
7733	240ml ボトル	1 本/箱	2,800 円	3,024 円

主成分：精製水、フェノキシエタノール、クエン酸第二銅 2 ナトリウム、メチルパラベン、エチルパラベン、ブチルパラベン、プロピルパラベン、イソブチルパラベン、クエン酸




FM フレックステンド M 皮膚保護剤

アダプト皮膚保護シール

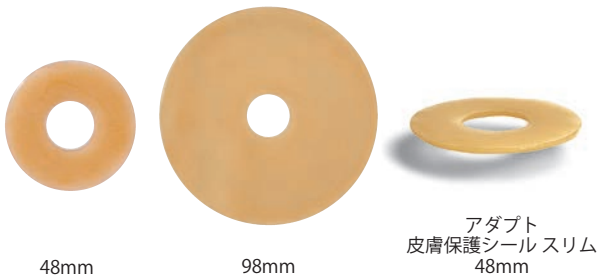

- 排泄物に対して優れた pH コントロールを発揮
- 非常に柔らかく、さまざまな用途にて使用可能な
用手成形皮膚保護剤
- 皮膚にしっかり密着し、腹壁の動きにも追従

流動性の高い PIB、柔軟性と耐久性の高いマイクロファイバー、pH 値緩衝作用のある親水性コロイド（ペクチン、CMC）の配合により、形状変更のしやすさと形状維持の両方を実現。

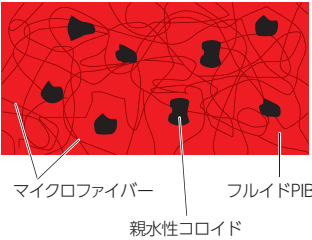

製品名	製品番号	規 格	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
アダプト皮膚保護シール	7805	直径 48mm、厚さ 4.45mm	10 枚／箱	5,000 円	5,400 円
	7806	直径 98mm、厚さ 2.30mm		6,200 円	6,696 円
アダプト皮膚保護シール スリム	7815	直径 48mm、厚さ 2.30mm		2,500 円	2,700 円

アダプト皮膚保護シール 使用方法



その他の使用方法




アダプト皮膚保護シール スリム 使用方法

簡単ステップ


1枚貼りで簡単に
しわやくぼみを補正

ステップ
1

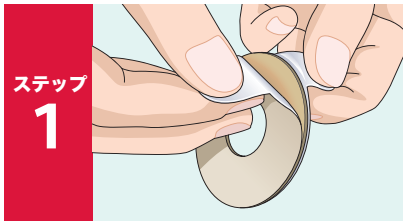

フィルムをはがす

ステップ
2

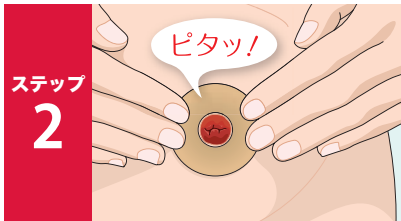

ストーマに合わせて貼る



FT フレックステンド皮膚保護剤


アダプト皮膚保護凸面リング



- 排泄物の漏れを防ぎ、ストーマ周囲の皮膚を保護
- 面板と併用して、浅い凸面構造を成形可能

製品番号	規 格 (内径)	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
79520	20mm	10 枚／箱	3,000 円	3,240 円
79530	30mm			
79540	40mm			

アダプト皮膚保護凸面リング オーバル

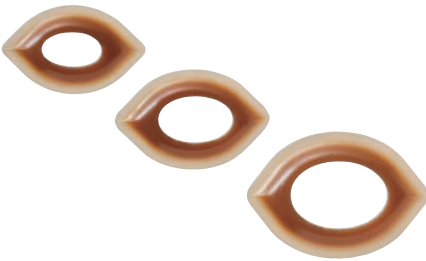

- オーバル（楕円）形状のリング状皮膚保護剤
- ストーマ周囲のしわにも追従
- 面板と併用して、浅い凸面構造を成形可能

製品番号	規 格 (内径)	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
79601	22×38mm	10 枚／箱	3,500 円	3,780 円
79602	30×48mm			
79603	38×56mm			

陥凹型ストーマの方や柔らかい凸面を使用したい方に

- さまざまな腹壁にフィットする、柔らかい凸面タイプの皮膚保護剤です。
- 装具と併用することで浅い凸面や深く柔らかい凸面を成形できます。
- 平坦な側を面板側に装着して使用します。





アクセサリー アダプトシリーズ

守る

アダプトストーマパウダー 28.3g

- ・ストーマ周囲などの皮膚を保護する粉状皮膚保護剤
- ・皮膚障害のある部位に薄く充填し、面板の密着を補助



製品番号	規 格	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
7906	28.3g	1 本 / 箱	1,100 円	1,188 円

主成分：ゼラチン、ペクチン、カルボキシメチルセルロース



振り
かける

ストーマ周囲皮膚に軽いびらんがある方に

- 装着した装具とストーマの隙間に充填し、皮膚への排泄物の付着を防ぎます。
- 皮膚障害部位など湿った環境に薄く充填することで皮膚保護剤の密着を補助します。

アダプト保護膜パック

- ・個別包装により常に衛生的な状態で使用可能
- ・アルコールフリー、肌への刺激を低減。主成分が水分なので引火の心配なし



製品番号	規 格	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
7917	50 枚	50 枚 / 箱	2,000 円	2,160 円

主成分：水分、ポリウレタン共重合体、アクリル系共重合体

アダプト保護膜パック 使用方法

1. 使用する前に、皮膚を清潔で乾いた状態にします。
 2. アダプト保護膜パックを薄くまんべんなく塗り、乾かします。
- ※ 傷のある皮膚面（びらん、ただれ、褥瘡等）や敏感な場所（目や目の周辺）には使用できません。



アクセサリー アダプトシリーズ


は
剥がす

アダプト剥離剤スプレー

- ・皮膚保護剤をしっかりと剥離、のり残りの心配なし
- ・剥離後、肌はサラサラで装具交換をより簡単に（シリコン素材使用）
- ・お肌に低刺激のノンアルコール剥離剤

とく
らく
得楽タイプ

どの角度からでも
スプレー可能

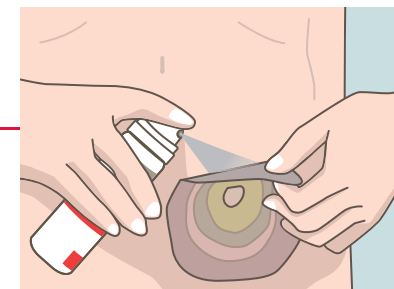

製品番号	規 格	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
7737	50ml	1 本 / 箱	1,900 円	2,052 円

主成分：ヘキサメチルジシロキサン 加圧ガス：ニトロゲン


2018年6月販売終了予定

製品番号	規 格	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
7731	76ml	1 本 / 箱	2,900 円	3,132 円

主成分：ヘキサメチルジシロキサン 加圧ガス：イソブタン

アダプト剥離剤パック

- ・皮膚保護剤をしっかりと剥離、のり残りの心配なし
- ・剥離後、肌はサラサラで装具交換をより簡単に（シリコン素材使用）
- ・お肌に低刺激のノンアルコール剥離剤
- ・パックは必要分だけ持ち運べるので外出にも便利

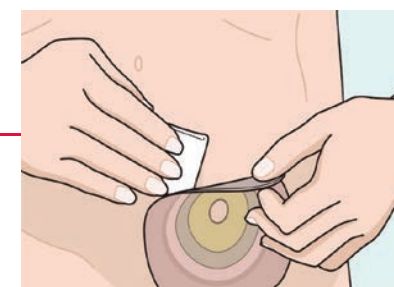

製品番号	規 格	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
7760	50 枚	50 枚 / 箱	1,800 円	1,944 円

主成分：ヘキサメチルジシロキサン

剥離剤の使用法

1. 皮膚保護剤や粘着テープの端を剥がし、剥離剤を使用し優しく剥がします。
 2. 皮膚保護剤や粘着テープが皮膚から完全に剥がれたら、粘着剤の残りを優しく拭き取ります。
 3. 皮膚を水と石鹸で洗い、よくすすぎ、水分を十分に拭き取ります。
- ※ 7731 アダプト剥離剤スプレーは、ご使用前によく振ってください。
(7737 得楽タイプは、振らずに使用できます。)


[注意事項] 火気厳禁。直射日光、電気器具、熱源の近くでご使用しないでください。



アクセサリー アダプトシリーズ

フレックステンド 皮膚保護シート


- ・フレックステンド皮膚保護剤を使用
- ・皮膚のしわ、くぼみを補正する板状皮膚保護剤
- ・排泄物の漏れを防ぎ、ストーマ周囲の皮膚を保護
- ・片面粘着タイプ

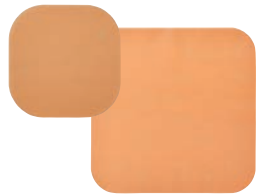

製品番号	規 格	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
8800	10.2×10.2cm	5 枚 / 箱	4,125 円	4,455 円
8801	20.4×20.4cm	3 枚 / 箱	7,500 円	8,100 円

プレミアム 皮膚保護シート

- ・皮膚のしわ、くぼみを補正する板状皮膚保護剤
- ・排泄物の漏れを防ぎ、ストーマ周囲の皮膚を保護
- ・片面粘着タイプ

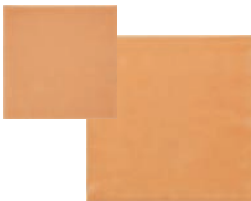

製品番号	規 格	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
7900	10×10cm	5 枚 / 箱	3,300 円	3,564 円
7901	20×20cm	4 枚 / 箱	8,000 円	8,640 円

主成分：ポリイソブチレン、ゼラチン、ペクチン、カルボキシメチルセルロース

ホリスター スキンバリア

- ・皮膚のしわ、くぼみを補正する板状皮膚保護剤
- ・排泄物の漏れを防ぎ、ストーマ周囲の皮膚を保護
- ・両面粘着タイプ



製品番号	規 格	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
7700	10×10cm	5 枚 / 箱	3,100 円	3,348 円
7701	20×20cm	4 枚 / 箱	7,500 円	8,100 円

主成分：ポリイソブチレン、ゼラチン、ペクチン、カルボキシメチルセルロース

アダプト皮膚保護ペースト 60g / ミニペースト

- ・皮膚のしわ、くぼみを補正する練状皮膚保護剤
- ・排泄物の漏れを防ぎ、ストーマ周囲の皮膚を保護
- ・絞りだしが簡単なラミネートチューブ
- ・アルコール含有（皮膚障害のある部位への使用はご注意ください）



製品番号	規 格	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
79300	60g	1 本 / 箱	2,400 円	2,592 円
79301	14g	20 本 / 箱	16,800 円	18,144 円



アクセサリー アダプトシリーズ

カラヤペースト 128g

- ・天然カラヤガムを使用した練状皮膚保護剤
- ・排泄物の漏れを防ぎ、ストーマ周囲の皮膚を保護
- ・アルコール含有（皮膚障害のある部位への使用はご注意ください）



製品番号	規 格	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
7910	128g	1 本 / 箱	2,500 円	2,700 円

カラヤパウダー 71g

- ・天然カラヤガムを使用した粉状皮膚保護剤
- ・皮膚障害のある部位に薄く充填し、面板の密着を補助



製品番号	規 格	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
7905	71g	1 本 / 箱	1,800 円	1,944 円

アダプト オストミーベルト

- ・ストーマ装具固定用ベルト
- ・腹壁へのストーマ装具の密着を補助



製品番号	規 格	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
7300-1	58～109cm	1 本 / 箱	900 円	972 円

ドレインストッパー 肌

- ・コロストミー用、イレオストミー用装具に使用可能
- ・ストーマ袋の裾を安全に閉鎖



製品番号	規 格	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
8770	弓状長さ 9.8cm、幅 1.7cm	20 個 / 箱	6,000 円	6,480 円

消臭ガス抜きフィルター

- ・ストーマ袋からのにおいを消臭するガス抜きフィルター
- ・フィルター付カラヤ5 ドレイン、フィルター付びたりんドレイン、フィルター付びたりんドレイン肌専用



製品番号	規 格	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
7766	20 個+入浴用プラグ 2 個 / バック	5 バック / 箱	4,000 円	4,320 円



尿路用
関連製品

尿路用関連製品



レッグバッグセット 540 /レッグバッグセット 900

- ・インケア・レッグバッグとインケア・チューブ、ストラップを組合わせたセット製品

製品番号	品 名	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
9834	レッグバッグ セット 540	インケア・レッグバッグ(滅菌)540ml 4 枚 インケア・チューブラテックスフリー(46cm) 1 本 インケア・ストラップ(58cm) 1 組 / 箱	6,000 円	6,480 円
9835	レッグバッグ セット 900	インケア・レッグバッグ(滅菌)900ml 4 枚 インケア・チューブラテックスフリー(46cm) 1 本 インケア・ストラップ(58cm) 1 組 / 箱	6,000 円	6,480 円



ベッドサイド・ドレンバッグ（滅菌）

- ・チューブとバッグの内部を、滅菌済み
- ・使い易いベッドハンガーとチューブを固定するシートクリップが付属
- ・バッグは逆流防止弁とエアフィルター付きですので逆流感染の危険を低減可能
- ・テーパ型コネクターにより、各種のカテーテルや延長チューブなどと接続可能
検体採取のためのサンプルポートが付属
- ・再使用不可。交換目安は約 1 週間



製品番号	規格(内容量)	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
9839	2000ml	20 枚 / 箱	9,200 円	9,936 円

m9 クリーナー



- ・インケア・レッグバッグなどの蓄尿容器に使用する濃縮液体クリーナー
- ・添付の洗浄ボトルを用いて、温湯で希釈して使用（約 60 回分）
- ・独自の配合により、尿による汚れ、臭い、付着固形分を除去
- ・弱アルカリ性（約 pH7.5）で刺激性がなく安心して使用可能

※ 本品はレッグバッグなどの交換期間を延ばすものではありません。
インケア・レッグバッグなどは衛生上、約 1 週間を目安に交換してください。

製品番号	規格(内容量)	包装内容	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
7736	480ml	クリーナー 1 本、 洗浄ボトル 1 本 / セット	1,900 円	2,052 円

成分：精製水、酢酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、グリセリン、オクトキシノール -9、
クエン酸第二銅 2 ナトリウム、アルキルアリルアルコシカリウム塩、2- ブロモ -2-
ニトロ -1,3- プロパンジオール

尿路用関連製品



ウロ接続管 S



- ・ウロストミー用装具に使用可能
- ・レッグバッグなどへの接続の際に使用

製品番号	規 格	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
7331	長さ 6.5cm 幅 1.5cm	10 本 / 箱	4,500 円	4,860 円

インケア・レッグバッグ（滅菌）



- ・あらゆる泌尿器用ストーマ袋や失禁製品に接続可能
- ・尿をスムーズにバッグに溜めるので、長時間の外出や、快適な睡眠を得るために最適
- ・足に装着するので、布団でもベッドでも使用可能
- ・容量が大きくなっても目立たないタック構造
- ・逆流防止弁付きで、感染の問題を軽減
- ・臭いの心配がない防臭フィルム使用
- ・尿の処理はワンタッチクランプで簡単対処
- ・膀胱内留置カテーテルなどにも使用可能
- ・再使用不可。交換目安は約 1 週間

製品番号	規格(内容量)	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
9814	540ml	10 枚 / 箱	10,000 円	10,800 円
9805	900ml			

インケア・チューブ ラテックスフリー



チューブはしっかり
差し込んでください。

- ・天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの延長チューブ
- ・特殊な長円形断面構造で、ねじれやつまりが起こりにくい
- ・用途に応じて、滅菌、未滅菌が選択可能

製品番号	規格(長さ)	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
9345	46cm	10 本 / 箱	5,000 円	5,400 円
9346 (滅菌)	46cm		6,500 円	7,020 円

インケア・ストラップ（2 本 1 組）



- ・インケア・レッグバッグを足に固定するためのバンド

製品番号	規格(長さ)	包装単位	本体価格 (税抜)	税込価格 (税率 8%)
9342	38cm	10 組 / 箱	9,000 円	9,720 円
9343	58cm	3 組 / 箱	2,700 円	2,916 円



お子さま用装具 パウチキンシリーズ



お子さま用装具パウチキンシリーズ

お子さまの成長に合わせてご選択いただけるパウチキンシリーズです。

SF
1・4日間

ソフトフレックス皮膚保護剤

パウチキン 未熟児用 パウチ

平面

- ・コットンファイバー配合により適度な耐久性と剥離刺激の軽減を実現



製品番号	カット可能サイズ	内容量	皮膚保護剤	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
3777	0～16mm	10cc	5cm	11.3×6cm	15 枚 / 箱	4,500 円 (非課税)

※ツイストタイ密封金具 15 本付

パウチキン 新生児用 パウチ

平面

- ・コットンファイバー配合により適度な耐久性と剥離刺激の軽減を実現
- ・裾をカットして下部開放型としても使用可能



製品番号	カット可能サイズ	内容量	皮膚保護剤	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
3778	縦35～ 横23mm	100cc	6.3cm	20×7.4cm	15 枚 / 箱	5,250 円 (非課税)

※ツイストタイ密封金具 15 本付



お子さま用装具パウチキンシリーズ

SF
1・4日間

ソフトフレックス皮膚保護剤

パウチキン 小児用 ツーピース SFF

平面

- ・コットンファイバー配合により適度な耐久性と剥離刺激の軽減を実現



浮動型
フランジ



超うす型
フランジ



センター
ポイント
ロック



製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	粘着面	包装単位	価 格
3761	0～32mm	44mm	8.5×8.5cm	5 枚 / 箱	3,350 円 (非課税)

パウチキン 小児用 ツーピース ロックンロール

- ・ロックンロールマイクロシールで簡単に閉鎖



ロックン
ロール
マイクロ
シール



超うす型
フランジ



センター
ポイント
ロック



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



ベルトタブ



製品番号	フランジサイズ	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
3799	44mm	20.5×11cm	10 枚 / 箱	2,200 円 (非課税)

パウチキン 小児用 ワンピース ロックンロール

平面

- ・ロックンロールマイクロシールで簡単、安全に閉鎖



ロックン
ロール
マイクロ
シール



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
3796	0～38mm	7×7cm	20.5×11cm	10 枚 / 箱	4,500 円 (非課税)

パウチキン こども用 ワンピース ロックンロール

平面

- ・ロックンロールマイクロシールで簡単、安全に閉鎖
- ・エアースペースにより装着時の皮膚の休息を実現



エア
スペース



AF300
オストミ
フィルター



ロックン
ロール
マイクロ
シール




防臭
しなやか
フィルム




肌様
不織布



製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
3795	0～51mm	10.3×10cm	22×14.5cm	10 枚 / 箱	5,000 円 (非課税)

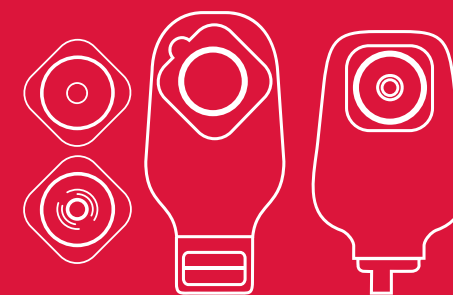

その他製品

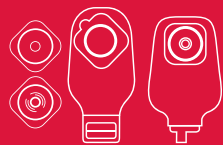

その他製品 カラヤシリーズ

カラヤ 5 皮膚保護剤

天然カラヤガムをベースに作られたカラヤ 5 シールリングを使用しています。

柔らかい凸面の構造で、乾いた皮膚にも湿った皮膚にも密着し、ストーマ周囲の皮膚にぴったり密着します。

※装着期間の目安：1～2日間（個人差があり、使用状況によって期間は異なります。）

フィルター付 カラヤ 5 ドレイン



伸縮性
テープ



防臭
しなやか
フィルム



ベルトタブ

製品番号	規 格	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
3668	32mm	22mm	10.8×10.8cm	30×16.3cm	15 枚 / 箱	11,800 円 (非課税)
3663	38mm	29mm				
3669	44mm	35mm				
3664	51mm	38mm				

※消臭ガス抜きフィルター 20 個、入浴用プラグ 2 個、ドレインストッパー肌 1 個付

カラヤ 5 ドレイン



伸縮性
テープ



防臭
しなやか
フィルム




ベルトタブ

製品番号	規 格	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
3608	32mm	22mm	10.8×10.8cm	30×16.3cm	15 枚 / 箱	8,600 円 (非課税)
3603	38mm	29mm				
3609	44mm	35mm				
3604	51mm	38mm				
3605	64mm	51mm	12.8×12.8cm			
3606	76mm	64mm				

※ドレインストッパー肌 1 個付

カラヤ 5 クローズ

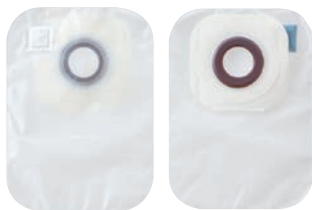

伸縮性
テープ



防臭
フィルム



ベルトタブ

製品番号	規 格	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
3323	38mm	29mm	10.8×10.8cm	23×16.3cm	30 枚 / 箱	10,900 円 (非課税)
3329	44mm	35mm				

カラヤ 5 ウロ



伸縮性
テープ



防臭
しなやか
フィルム



逆流防止
機構




排出量
調整口



ベルトタブ

製品番号	規 格	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
1432	25mm	16mm	10.8×10.8cm	23×15.4cm	10 枚 / 箱	8,500 円 (非課税)
1438	32mm	22mm				
1433	38mm	29mm				
1439	44mm	35mm				

※ウロ接続管 1 本付、ウロキャップ 2 個付

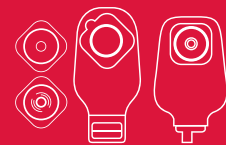

その他製品 カラヤシリーズ

ストマドレイン KL



伸縮性
テープ



防臭
フィルム



ベルトタブ

製品番号	規 格	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
3278	32mm	22mm	10.8×10.8cm	40×16.3cm	30 枚 / 箱	12,800 円 (非課税)
3273	38mm	29mm				
3279	44mm	35mm				
3274	51mm	38mm				
3275	64mm	51mm	12.8×12.8cm			

※ドレインストッパー肌 1 個付

ストマドレイン KS



伸縮性
テープ



防臭
フィルム



ベルトタブ

製品番号	規 格	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
3228	32mm	22mm	10.8×10.8cm	30×16.3cm	30 枚 / 箱	12,800 円 (非課税)
3223	38mm	29mm				
3229	44mm	35mm				
3224	51mm	38mm				

※ドレインストッパー肌 1 個付

ストマドレイン Q 肌



伸縮性
テープ



防臭
フィルム



ベルトタブ

製品番号	規 格	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
3113	38mm	29mm	10.8×10.8cm	30×16.3cm	30 枚 / 箱	12,800 円 (非課税)
3119	44mm	35mm				

※ドレインストッパー肌 1 個付

カラヤシリーズ こども用

こども用 カラヤ 5 ドレイン



伸縮性
テープ




防臭
フィルム



ベルトタブ

製品番号	規 格	既製孔径	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
3238	32mm	22mm	10.8×10.8cm	23×13.6cm	30 枚 / 箱	9,100 円 (非課税)
3233	38mm	29mm				
3239	44mm	35mm				

※ドレインストッパー肌 1 個付

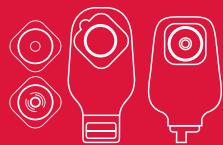

その他製品 ぴたりんシリーズ

お好みカット ぴたりん ベース

平面



浮動型
フランジ



センター
ポイント
ロック



SF
1・4
日産

製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	組み合わせ	包装単位	価 格
3767	13～25mm	38mm	H	5 枚 / 箱	4,300 円 (非課税)
3762	13～32mm	44mm	I		
3763	13～44mm	57mm	J		
3764	13～57mm	70mm	K		
3766	13～89mm	102mm	L		7,300 円 (非課税)

お好みカット 凸面 ぴたりん ベース

凸面



浮動型
フランジ



クッション
フィット
バックিং
フィルム



センター
ポイント
ロック



FW
3・5
日産

製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	組み合わせ	包装単位	価 格
3794	13～25mm	44mm	I	5 枚 / 箱	5,500 円 (非課税)
3798	13～38mm	57mm	J		
37911	13～51mm	70mm	K		

凸面 ぴたりん ベース

凸面



浮動型
フランジ



クッション
フィット
バックিং
フィルム



センター
ポイント
ロック



FW
3・5
日産

製品番号	既製孔径	組み合わせ	包装単位	価 格
3782	19mm	H	5 枚 / 箱	5,500 円 (非課税)
3783	22mm	I		
3784	25mm			
3785	29mm	J		
3786	32mm			

凸面 ぴたりん バリア

凸面



浮動型
フランジ



クッション
フィット
バックিং
フィルム



センター
ポイント
ロック



FW
3・5
日産

製品番号	既製孔径	組み合わせ	包装単位	価 格
3730	13mm	H	5 枚 / 箱	5,500 円 (非課税)
3731	16mm			
3732	19mm			
3733	22mm	I		
3734	25mm			
3735	29mm	J		
3736	32mm			
3737	35mm			
3738	38mm			
3739	41mm	K		
37310	44mm			
37311	51mm			



その他製品 ぴたりんシリーズ

お好みカット ぴたりん バリア


平面



浮動型
フランジ



センター
ポイント
ロック

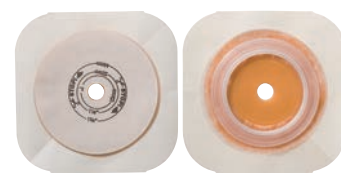

FW
3・5
日産

製品番号	カット可能サイズ	フランジサイズ	組み合わせ	包装単位	価 格
3727	13～25mm	38mm	H	5 枚 / 箱	4,300 円 (非課税)
3722	13～32mm	44mm	I		
3723	13～44mm	57mm	J		
3724	13～57mm	70mm	K		

ぴたりん バリア

平面



浮動型
フランジ



センター
ポイント
ロック



FW
3・5
日産

製品番号	既製孔径	組み合わせ	包装単位	価 格
3747	19mm	H	5 枚 / 箱	4,300 円 (非課税)
3742	25mm			
3748	32mm	I		
3743	38mm	J		
3749	44mm			

フィルター付 ぴたりん ドレイン




センター
ポイント
ロック



防臭
しなやか
フィルム



消臭
ガス抜き
フィルター

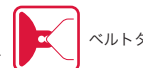

ベルトタブ



製品番号	フランジサイズ	組み合わせ	包装単位	価 格
3892	44mm	I	10 枚 / 箱	5,100 円 (非課税)
3893	57mm	J		

※消臭ガス抜きフィルター 20 個、入浴用プラグ2個、ドレインストッパー肌 1 個付

フィルター付 ぴたりん ドレイン 肌




センター
ポイント
ロック



防臭
しなやか
フィルム



消臭
ガス抜き
フィルター

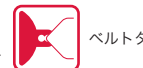

ベルトタブ



製品番号	フランジサイズ	組み合わせ	包装単位	価 格
3832	44mm	I	10 枚 / 箱	5,100 円 (非課税)
3833	57mm	J		
3834	70mm	K		

※消臭ガス抜きフィルター 20 個、入浴用プラグ2個、ドレインストッパー肌 1 個付

ぴたりん ドレイン




センター
ポイント
ロック



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布

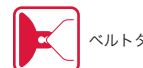


ベルトタブ



製品番号	フランジサイズ	組み合わせ	包装単位	価 格
3807	38mm	H	10 枚 / 箱	2,900 円 (非課税)
3802	44mm	I		
3803	57mm	J		
3804	70mm	K		
3806	102mm	L		

※ドレインストッパー肌 1 個付
※3803 は、ウルトラクリアフィルム使用

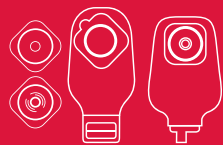

その他製品 ぴたりんシリーズ

ぴたりん ド레인 肌



センター
ポイント
ロック



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



ベルトタブ

製品番号	フランジサイズ	組み合わせ	包装単位	価 格
3817	38mm	H	10 枚 / 箱	2,900 円 (非課税)
3812	44mm	I		
3813	57mm	J		
3814	70mm	K		

※ドレインストッパー肌 1 個付

ぴたりん ミニド레인 肌



センター
ポイント
ロック



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



ベルトタブ

製品番号	フランジサイズ	組み合わせ	包装単位	価 格
3843	57mm	J	10 枚 / 箱	2,900 円 (非課税)

※ドレインストッパー肌 1 個付

ぴたりん クローズ 肌



センター
ポイント
ロック



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



ベルトタブ

製品番号	フランジサイズ	組み合わせ	包装単位	価 格
3342	44mm	I	30 枚 / 箱	8,400 円 (非課税)
3343	57mm	J		
3344	70mm	K		

ぴたりん ストマキャップ 肌



センター
ポイント
ロック



防臭
しなやか
フィルム



消臭
ガス抜き
フィルター

製品番号	フランジサイズ	組み合わせ	包装単位	価 格
3402	44mm	I	30 枚 / 箱	7,600 円 (非課税)
3403	57mm	J		

ぴたりん ウロ



逆流防止
機構



排出量
調整口



センター
ポイント
ロック



防臭
しなやか
フィルム



ベルトタブ

製品番号	フランジサイズ	組み合わせ	包装単位	価 格
3907	38mm	H	10 枚 / 箱	7,200 円 (非課税)
3902	44mm	I		
3903	57mm	J		
3904	70mm	K		

※ウロ接続管 1 本付、ウロキャップ 2 個付



その他製品 しなやかシリーズ

お好みカット コンパクトド레인 肌

平面



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



SF
1・4
日着

製品番号	カット可能サイズ	包装単位	価 格
3251	13~64mm	10 枚 / 箱	4,800 円 (非課税)

※ドレインストッパー肌 1 個付、ツイストタイ密封金具 10 本付

凸面 コンパクト ド레인

凸面



クッション
フィット
パッキング
フィルム



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



ベルトタブ



SF
1・4
日着

製品番号	既製孔径	包装単位	価 格
3280	19mm	10 枚 / 箱	9,900 円 (非課税)
3281	22mm		
3282	25mm		
3283	29mm		
3284	32mm		
3285	35mm		
3286	38mm		

※ドレインストッパー肌 1 個付、ツイストタイ密封金具 10 本付

お好みカット しなやかド레인 肌

平面



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



SF
1・4
日着

製品番号	カット可能サイズ	包装単位	価 格
3250	13~64mm	10 枚 / 箱	4,800 円 (非課税)

※ドレインストッパー肌 1 個付、ツイストタイ密封金具 10 本付

しなやかド레인 肌

平面



防臭
しなやか
フィルム




肌様
不織布



SF
1・4
日着

製品番号	既製孔径	包装単位	価 格
3252	25mm	10 枚 / 箱	4,800 円 (非課税)
3258	32mm		
3253	38mm		

※ドレインストッパー肌 1 個付、ツイストタイ密封金具 10 本付

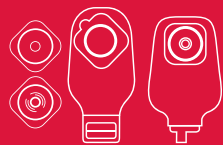

その他製品 しなやかシリーズ

凸面 しなやかドレイン



FW
3・5日

製品番号	既製孔径	包装単位	価 格
3613	29mm	10 枚 / 箱	9,900 円 (非課税)
3614	32mm		

※ドレインストッパー肌 1 個付

凸面



伸縮性
テープ



クッション
フィット
パッキング
フィルム



防臭
しなやか
フィルム



ベルトタブ

凸面 しなやかドレイン 肌



SF
1・4日

製品番号	既製孔径	包装単位	価 格
3261	22mm	10 枚 / 箱	9,900 円 (非課税)
3262	25mm		
3263	29mm		
3264	32mm		
3265	35mm		
3266	38mm		

※ドレインストッパー肌 1 個付、ツイストタイ密封金具 10 本付

凸面



クッション
フィット
パッキング
フィルム



防臭
しなやか
フィルム



肌様
不織布



ベルトタブ

お好みカット しなやか クローズ 肌



SF
1・4日

製品番号	カット可能サイズ	包装単位	価 格
3470	13~64mm	30 枚 / 箱	10,900 円 (非課税)

平面



防臭
しなやか
フィルム



消臭
ガス抜き
フィルター



肌様
不織布

しなやか クローズ 肌



SF
1・4日

製品番号	既製孔径	包装単位	価 格
3472	25mm	30 枚 / 箱	10,900 円 (非課税)
3478	32mm		
3473	38mm		
3479	44mm		
3474	51mm		

平面




防臭
しなやか
フィルム



消臭
ガス抜き
フィルター



肌様
不織布

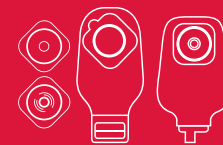

その他製品 しなやかシリーズ

凸面 クローズ 肌



SF
1・4日

製品番号	既製孔径	包装単位	価 格
3494	32mm	10 枚 / 箱	4,800 円 (非課税)

凸面



クッション
フィット
パッキング
フィルム



防臭
しなやか
フィルム



消臭
ガス抜き
フィルター



肌様
不織布



ベルトタブ

ストマキャップ MC



防臭
フィルム



消臭
ガス抜き
フィルター

製品番号	規 格	包装単位	価 格
3184	51mm	30 枚 / 箱	6,900 円 (非課税)

凸面 しなやか ウロ



FW
3・5日

製品番号	既製孔径	包装単位	価 格
1482	19mm	10 枚 / 箱	11,600 円 (非課税)
1483	22mm		
1484	25mm		
1485	29mm		

※ウロ接続管 1 本付、ウロキャップ 2 個付

凸面



伸縮性
テープ



クッション
フィット
パッキング
フィルム



防臭
しなやか
フィルム



逆流防止
機構



排出量
調整口



ベルトタブ

お好みカット 肌ウロ



SF
1・4日

製品番号	カット可能サイズ	包装単位	価 格
1401	13~64mm	10 枚 / 箱	8,800 円 (非課税)

※ウロ接続管 1 本付、ウロキャップ 10 個付

平面



防臭
しなやか
フィルム




肌様
不織布



逆流防止
機構



排出量
調整口

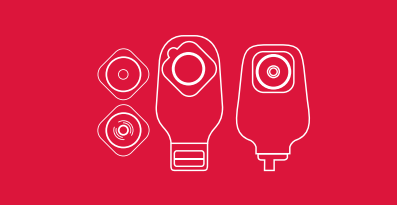

その他製品 しなやかシリーズ

はだ ウロ



SF 1・4日	製品番号	既製孔径	包装単位	価 格
	1447	19mm	10 枚 / 箱	8,800 円 (非課税)
	1442	25mm		
	1448	32mm		
	1443	38mm		

※ウロ接続管 1 本付、ウロキャップ 10 個付

凸面 はだ ウロ



SF 1・4日	製品番号	既製孔径	包装単位	価 格
	1450	13mm	10 枚 / 箱	11,600 円 (非課税)
	1451	16mm		
	1452	19mm		
	1453	22mm		
	1454	25mm		
	1455	29mm		
	1456	32mm		
	1457	35mm		
	1458	38mm		
	1459	44mm		

※ウロ接続管 1 本付、ウロキャップ 2 個付

滅菌 みるみるドレイン



FW 3・5日	製品番号	カット可能サイズ	粘着面	ストーマ袋サイズ	包装単位	価 格
	9701	0～76mm	10.8×10.8cm	25.5×13.5cm	10 枚 / 箱	13,200 円 (非課税)
	9702	0～95mm	直径 13.9cm	30×15cm		16,900 円 (非課税)

索引

単品系装具 モデルマフレックスシリーズ

製品番号	製品名	入数／箱	価格	単価（参考）	課税区分	ページ
28400	モデルマフレックス SF ロックンロール（お好みカット）	10 枚 / 箱	5,000	500	非課税	17
284XX	モデルマフレックス SF ロックンロール（プレカット）	10 枚 / 箱	5,000	500	非課税	17
28300	モデルマフレックス SF ロックンロール 肌（お好みカット）	10 枚 / 箱	5,000	500	非課税	17
283XX	モデルマフレックス SF ロックンロール 肌（プレカット）	10 枚 / 箱	5,000	500	非課税	17
2690X	モデルマフレックス SF 凸面ロックンロール（お好みカット）	10 枚 / 箱	8,800	880	非課税	18
269XX	モデルマフレックス SF 凸面ロックンロール（プレカット）	10 枚 / 箱	8,800	880	非課税	18
28401	モデルマフレックス SF ロックンロール オーバル（お好みカット）	10 枚 / 箱	6,500	650	非課税	18
28301	モデルマフレックス SF ロックンロール オーバル 肌（お好みカット）	10 枚 / 箱	6,500	650	非課税	18
28100	モデルマフレックス SF ロックンロール ミニ肌（お好みカット）	30 枚 / 箱	13,500	450	非課税	19
281XX	モデルマフレックス SF ロックンロール ミニ肌（プレカット）	30 枚 / 箱	13,500	450	非課税	19
22500	モデルマフレックス SF クローズ（お好みカット）	30 枚 / 箱	7,500	250	非課税	20
22100	モデルマフレックス SF クローズ 肌（お好みカット）	30 枚 / 箱	7,500	250	非課税	20
221XX	モデルマフレックス SF クローズ 肌（プレカット）	30 枚 / 箱	7,500	250	非課税	20
56910XX	やわびた（お好みカット）	10 枚 / 箱	9,800	980	非課税	21
56911XX	やわびた（プレカット）	10 枚 / 箱	9,800	980	非課税	21
56810XX	やわびた 素肌（お好みカット）	10 枚 / 箱	9,800	980	非課税	21
56811XX	やわびた 素肌（プレカット）	10 枚 / 箱	9,800	980	非課税	21
58400	モデルマフレックス FW ロックンロール（お好みカット）	10 枚 / 箱	6,800	680	非課税	22
584XX	モデルマフレックス FW ロックンロール（プレカット）	10 枚 / 箱	6,800	680	非課税	22
58300	モデルマフレックス FW ロックンロール 肌（お好みカット）	10 枚 / 箱	6,800	680	非課税	22
583XX	モデルマフレックス FW ロックンロール 肌（プレカット）	10 枚 / 箱	6,800	680	非課税	22
5670X	モデルマフレックス FW 凸面ロックンロール（お好みカット）	10 枚 / 箱	10,800	1,080	非課税	23
567XX	モデルマフレックス FW 凸面ロックンロール（プレカット）	10 枚 / 箱	10,800	1,080	非課税	23
5660X	モデルマフレックス FW 凸面ロックンロール 肌（お好みカット）	10 枚 / 箱	10,800	1,080	非課税	23
566XX	モデルマフレックス FW 凸面ロックンロール 肌（プレカット）	10 枚 / 箱	10,800	1,080	非課税	23
857X	やわびた FT（お好みカット）	5 枚 / 箱	4,950	990	非課税	24
867X	やわびた FT 素肌（お好みカット）	5 枚 / 箱	4,950	990	非課税	24
866X	やわびた FT 素肌（プレカット）	5 枚 / 箱	4,950	990	非課税	24

製品番号	製品名	入数／箱	価格	単価（参考）	課税区分	ページ
26700	モデルマフレックス FT ロックンロール（お好みカット）	10 枚 / 箱	5,400	540	非課税	25
267XX	モデルマフレックス FT ロックンロール（プレカット）	10 枚 / 箱	5,400	540	非課税	25
5790X	モデルマフレックス FT 凸面ロックンロール（お好みカット）	10 枚 / 箱	9,200	920	非課税	26
579XX	モデルマフレックス FT 凸面ロックンロール（プレカット）	10 枚 / 箱	9,200	920	非課税	26
26064	モデルマフレックス FT イレオストミーパウチ（お好みカット）	10 枚 / 箱	9,600	960	非課税	27
29990XX	やわびた ウロ S（お好みカット）	10 枚 / 箱	10,800	1,080	非課税	30
29991XX	やわびた ウロ S（プレカット）	10 枚 / 箱	10,800	1,080	非課税	30
2959055	モデルマフレックス SF ウロ S（お好みカット）	10 枚 / 箱	7,800	780	非課税	31
29390XX	モデルマフレックス SF 凸面 ウロ S（お好みカット）	10 枚 / 箱	10,800	1,080	非課税	31
29391XX	モデルマフレックス SF 凸面 ウロ S（プレカット）	10 枚 / 箱	10,800	1,080	非課税	31
2949064	モデルマフレックス FT ウロ S（お好みカット）	10 枚 / 箱	9,200	920	非課税	32
29491XX	モデルマフレックス FT ウロ S（プレカット）	10 枚 / 箱	9,200	920	非課税	32
29790XX	モデルマフレックス FT 凸面 ウロ S（お好みカット）	10 枚 / 箱	11,800	1,180	非課税	32
29791XX	モデルマフレックス FT 凸面 ウロ S（プレカット）	10 枚 / 箱	11,800	1,180	非課税	32

二品系装具 ニューイメージシリーズ

製品番号	製品名	入数／箱	価格	単価（参考）	課税区分	ページ
1410X	ニューイメージ FFF テープ付	5 枚 / 箱	5,400	1,080	非課税	41
1500X	ニューイメージ SFF（お好みカット）	5 枚 / 箱	3,500	700	非課税	42
1650X	ニューイメージ SFF（プレカット）	5 枚 / 箱	3,500	700	非課税	42
1420X	ニューイメージ FWF テープ付（お好みカット）	5 枚 / 箱	3,500	700	非課税	43
14206	ニューイメージ FWF テープ付（お好みカット 0 ～ 89mm）	5 枚 / 箱	6,500	1,300	非課税	43
1430X	ニューイメージ FWF テープ付（プレカット）	5 枚 / 箱	3,500	700	非課税	43
1520X	ニューイメージ FWF（お好みカット）	5 枚 / 箱	4,400	880	非課税	43
1640X	ニューイメージ FWF（プレカット）	5 枚 / 箱	4,400	880	非課税	43
1340X	ニューイメージ FWF 凸面テープ付（お好みカット）	5 枚 / 箱	4,750	950	非課税	44
1350X	ニューイメージ FWF 凸面テープ付（プレカット）	5 枚 / 箱	4,750	950	非課税	44
1540X	ニューイメージ FWF 凸面（お好みカット）	5 枚 / 箱	5,400	1,080	非課税	44
1550X	ニューイメージ FWF 凸面（プレカット）	5 枚 / 箱	5,400	1,080	非課税	44

製品番号	製品名	入数／箱	価格	単価（参考）	課税区分	ページ
1460X	ニューイメージ FTF テープ付（お好みカット）	5 枚 / 箱	5,400	1,080	非課税	45
14606	ニューイメージ FTF テープ付（お好みカット 0 ～ 89mm ）	5 枚 / 箱	7,500	1,500	非課税	45
1470X	ニューイメージ FTF テープ付（プレカット）	5 枚 / 箱	5,400	1,080	非課税	45
1560X	ニューイメージ FTF（お好みカット）	5 枚 / 箱	4,950	990	非課税	45
1610X	ニューイメージ FTF（プレカット）	5 枚 / 箱	4,950	990	非課税	45
1380X	ニューイメージ FTF 凸面テープ付（お好みカット）	5 枚 / 箱	6,400	1,280	非課税	46
139XX	ニューイメージ FTF 凸面テープ付（プレカット）	5 枚 / 箱	6,400	1,280	非課税	46
1580X	ニューイメージ FTF 凸面（お好みカット）	5 枚 / 箱	5,950	1,190	非課税	46
1590X	ニューイメージ FTF 凸面（プレカット）	5 枚 / 箱	5,950	1,190	非課税	46
1819X	ニューイメージ ロックンロール	10 枚 / 箱	3,800	380	非課税	47
1818X	ニューイメージ ロックンロール 肌	10 枚 / 箱	3,800	380	非課税	47
1800X	ニューイメージ ドレイン ロックンロール	10 枚 / 箱	3,300	330	非課税	47
18006	ニューイメージ ドレイン ロックンロール(フランジサイズ:102mm)	10 枚 / 箱	5,000	500	非課税	47
1816X	ニューイメージ フィルター付ドレイン	10 枚 / 箱	3,600	360	非課税	48
1814X	ニューイメージ フィルター付ドレイン 肌	10 枚 / 箱	3,600	360	非課税	48
1810X	ニューイメージ ドレイン	10 枚 / 箱	2,400	240	非課税	48
1812X	ニューイメージ ドレイン 肌	10 枚 / 箱	2,400	240	非課税	48
1829X	ニューイメージ ロックンロール ミニ	20 枚 / 箱	7,000	350	非課税	49
1828X	ニューイメージ ロックンロール ミニ 肌	20 枚 / 箱	7,000	350	非課税	49
1820X	ニューイメージ ミニドレイン 肌	10 枚 / 箱	2,400	240	非課税	49
1838X	ニューイメージ ミニクローズ	30 枚 / 箱	7,800	260	非課税	50
1839X	ニューイメージ ミニクローズ 肌	30 枚 / 箱	7,800	260	非課税	50
1801X	ニューイメージ イレオストミーパウチ	10 枚 / 箱	5,000	500	非課税	51
18016	ニューイメージ イレオストミーパウチ（フランジサイズ：102mm ）	10 枚 / 箱	7,000	700	非課税	51
1892X	ニューイメージ ウロ S ウルトラクリア	10 枚 / 箱	6,000	600	非課税	52
1890X	ニューイメージ ウロ S	10 枚 / 箱	5,900	590	非課税	52
1891X	ニューイメージ ウロ S 肌	10 枚 / 箱	5,900	590	非課税	52

アクセサリー アダプトシリーズ

製品番号	製品名	入数／箱	本体価格	税込価格	単価（参考）	ページ
78500	アダプト消臭潤滑剤 236ml ボトル	1 本 / 箱	2,800	3,024	2,800	55
78501	アダプト消臭潤滑剤 8ml パック	50 枚 / 箱	3,800	4,104	76	55
7732	m9 消臭スプレー 60ml ボトル	1 本 / 箱	1,400	1,512	1,400	56
7733	m9 消臭スプレー 240ml ボトル	1 本 / 箱	2,800	3,024	2,800	56
7805	アダプト皮膚保護シール 48mm	10 枚 / 箱	5,000	5,400	500	57
7806	アダプト皮膚保護シール 98mm	10 枚 / 箱	6,200	6,696	620	57
7815	アダプト皮膚保護シール スリム	10 枚 / 箱	2,500	2,700	250	57
79520	アダプト皮膚保護凸面リング 20mm	10 枚 / 箱	3,000	3,240	300	58
79530	アダプト皮膚保護凸面リング 30mm	10 枚 / 箱	3,000	3,240	300	58
79540	アダプト皮膚保護凸面リング 40mm	10 枚 / 箱	3,000	3,240	300	58
79601	アダプト皮膚保護凸面リング オーバル 22×38mm	10 枚 / 箱	3,500	3,780	350	58
79602	アダプト皮膚保護凸面リング オーバル 30×48mm	10 枚 / 箱	3,500	3,780	350	58
79603	アダプト皮膚保護凸面リング オーバル 38×56mm	10 枚 / 箱	3,500	3,780	350	58
7906	アダプトストーマパウダー 28.3g	1 本 / 箱	1,100	1,188	1,100	59
7917	アダプト保護膜パック	50 枚 / 箱	2,000	2,160	40	59
7737	アダプトはくり剤スプレー得楽タイプ（50ml ）	1 本 / 箱	1,900	2,052	1,900	60
*7731	アダプト剥離剤スプレー（76ml ）	1 本 / 箱	2,900	3,132	2,900	60
7760	アダプト剥離剤パック	50 枚 / 箱	1,800	1,944	36	60
8800	フレックステンド 皮膚保護シート（規格：10.2×10.2cm）	5 枚 / 箱	4,125	4,455	825	61
8801	フレックステンド 皮膚保護シート（規格：20.4×20.4cm）	3 枚 / 箱	7,500	8,100	2,500	61
7900	プレミアム 皮膚保護シート（規格：10×10cm）	5 枚 / 箱	3,300	3,564	660	61
7901	プレミアム 皮膚保護シート（規格：20×20cm）	4 枚 / 箱	8,000	8,640	2,000	61
7700	ホリスター スキンバリア（規格：10×10cm）	5 枚 / 箱	3,100	3,348	620	61
7701	ホリスター スキンバリア（規格：20×20cm）	4 枚 / 箱	7,500	8,100	1,875	61
79300	アダプト皮膚保護ベースト 60g	1 本 / 箱	2,400	2,592	2,400	61
79301	アダプト皮膚保護ミニベースト	20 本 / 箱	16,800	18,144	840	61
7910	カラヤペースト 128g	1 本 / 箱	2,500	2,700	2,500	62
7905	カラヤパウダー 71g	1 本 / 箱	1,800	1,944	1,800	62

＊ 2018 年 6 月末日に販売を終了致します。

製品番号	製品名	入数／箱	本体価格	税込価格	単価（参考）	ページ
7300-1	アダプト オストミーベルト	1 本 / 箱	900	972	900	62
8770	ドレインストッパー 肌	20 個 / 箱	6,000	6,480	300	62
7766	消臭ガス抜きフィルター	5 パック / 箱	4,000	4,320	800	62

尿路用関連製品

製品番号	製品名	入数／箱	本体価格	税込価格	単価（参考）	ページ
7331	ウロ接続管 S	10 本 / 箱	4,500	4,860	450	65
9814	インケア・レッグバッグ 540ml（滅菌）	10 枚 / 箱	10,000	10,800	1,000	65
9805	インケア・レッグバッグ 900ml（滅菌）	10 枚 / 箱	10,000	10,800	1,000	65
9345	インケア・チューブ ラテックスフリー 46cm	10 本 / 箱	5,000	5,400	500	65
9346	インケア・チューブ ラテックスフリー 46cm（滅菌）	10 本 / 箱	6,500	7,020	650	65
9342	インケア・ストラップ（2 本 1 組） 38cm	10 組 / 箱	9,000	9,720	900	65
9343	インケア・ストラップ（2 本 1 組） 58cm	3 組 / 箱	2,700	2,916	900	65
9834	レッグバッグセット 540	1 組 / 箱	6,000	6,480	6,000	66
9835	レッグバッグセット 900	1 組 / 箱	6,000	6,480	6,000	66
9839	ベッドサイド・ドレンバッグ（滅菌）	20 枚 / 箱	9,200	9,936	460	66
7736	m9 クリーナー	1 本 / 箱	1,900	2,052	1,900	66

お子さま用装具 パウチキンシリーズ

製品番号	製品名	入数／箱	価格	単価（参考）	課税区分	ページ
3777	パウチキン 未熟児用 パウチ	15 枚 / 箱	4,500	300	非課税	69
3778	パウチキン 新生児用 パウチ	15 枚 / 箱	5,250	350	非課税	69
3761	パウチキン 小児用 ツーピース SFF	5 枚 / 箱	3,350	670	非課税	70
3799	パウチキン 小児用 ツーピース ロックンロール	10 枚 / 箱	2,200	220	非課税	70
3796	パウチキン 小児用 ワンピース ロックンロール	10 枚 / 箱	4,500	450	非課税	70
3795	パウチキン こども用 ワンピース ロックンロール	10 枚 / 箱	5,000	500	非課税	70

その他製品

製品番号	製品名	入数／箱	価格	単価（参考）	課税区分	ページ
366X	フィルター付 カラヤ5ドレイン	15 枚 / 箱	11,800	787	非課税	73
360X	カラヤ5ドレイン	15 枚 / 箱	8,600	573	非課税	73
332X	カラヤ5クローズ	30 枚 / 箱	10,900	363	非課税	73
143X	カラヤ 5 ウロ	10 枚 / 箱	8,500	850	非課税	73
327X	ストマドレイン KL	30 枚 / 箱	12,800	427	非課税	74
322X	ストマドレイン KS	30 枚 / 箱	12,800	427	非課税	74
311X	ストマドレイン Q 肌	30 枚 / 箱	12,800	427	非課税	74
323X	こども用 カラヤ5ドレイン	30 枚 / 箱	9,100	303	非課税	74
376X	お好みカット びたりん ベース	5 枚 / 箱	4,300	860	非課税	75
3766	お好みカット びたりん ベース（フランジサイズ：102mm）	5 枚 / 箱	7,300	1,460	非課税	75
379X	お好みカット 凸面 びたりん ベース	5 枚 / 箱	5,500	1,100	非課税	75
378X	凸面 びたりん ベース	5 枚 / 箱	5,500	1,100	非課税	75
373X	凸面 びたりん バリア	5 枚 / 箱	5,500	1,100	非課税	75
372X	お好みカット びたりん バリア	5 枚 / 箱	4,300	860	非課税	76
374X	びたりん バリア	5 枚 / 箱	4,300	860	非課税	76
389X	フィルター付 びたりん ドレイン	10 枚 / 箱	5,100	510	非課税	76
383X	フィルター付 びたりん ドレイン 肌	10 枚 / 箱	5,100	510	非課税	76
380X	びたりん ドレイン	10 枚 / 箱	2,900	290	非課税	76
3806	びたりん ドレイン（フランジサイズ：102mm）	10 枚 / 箱	5,500	550	非課税	76
381X	びたりん ドレイン 肌	10 枚 / 箱	2,900	290	非課税	77
3843	びたりん ミニドレイン 肌	10 枚 / 箱	2,900	290	非課税	77
334X	びたりん クローズ 肌	30 枚 / 箱	8,400	280	非課税	77
340X	びたりん ストマキャップ 肌	30 枚 / 箱	7,600	253	非課税	77
390X	びたりん ウロ	10 枚 / 箱	7,200	720	非課税	77
3251	お好みカット コンパクトドレイン 肌	10 枚 / 箱	4,800	480	非課税	78
328X	凸面 コンパクト ドレイン	10 枚 / 箱	9,900	990	非課税	78
3250	お好みカット しなやかドレイン 肌	10 枚 / 箱	4,800	480	非課税	78
325X	しなやかドレイン 肌	10 枚 / 箱	4,800	480	非課税	78

製品番号	製品名	入数／箱	価格	単価（参考）	課税区分	ページ
361X	凸面 しなやかドレイン	10 枚 / 箱	9,900	990	非課税	79
326X	凸面 しなやかドレイン 肌	10 枚 / 箱	9,900	990	非課税	79
3470	お好みカット しなやか クローズ 肌	30 枚 / 箱	10,900	363	非課税	79
347X	しなやか クローズ 肌	30 枚 / 箱	10,900	363	非課税	79
3494	凸面 クローズ 肌	10 枚 / 箱	4,800	480	非課税	80
3184	ストマキャップ MC	30 枚 / 箱	6,900	230	非課税	80
148X	凸面 しなやか ウロ	10 枚 / 箱	11,600	1,160	非課税	80
1401	お好みカット 肌ウロ	10 枚 / 箱	8,800	880	非課税	80
144X	はだ ウロ	10 枚 / 箱	8,800	880	非課税	81
145X	凸面 はだ ウロ	10 枚 / 箱	11,600	1,160	非課税	81
9701	滅菌 みるみるドレイン （カット可能サイズ：0～76mm）	10 枚 / 箱	13,200	1,320	非課税	81
9702	滅菌 みるみるドレイン （カット可能サイズ：0～95mm）	10 枚 / 箱	16,900	1,690	非課税	81

製品番号	製品名	ページ
1340X	ニューイメージ FWF 凸面テープ付（お好みカット）	44
1350X	ニューイメージ FWF 凸面テープ付（プレカット）	44
1380X	ニューイメージ FTF 凸面テープ付（お好みカット）	46
139XX	ニューイメージ FTF 凸面テープ付（プレカット）	46
1401	お好みカット 肌ウロ	80
1410X	ニューイメージ FFF テープ付	41
1420X	ニューイメージ FWF テープ付（お好みカット）	43
143X	カラヤ5 ウロ	73
1430X	ニューイメージ FWF テープ付（プレカット）	43
144X	はだ ウロ	81
145X	凸面 はだウロ	81
1460X	ニューイメージ FTF テープ付（お好みカット）	45
1470X	ニューイメージ FTF テープ付（プレカット）	45
148X	凸面 しなやかウロ	80
1500X	ニューイメージ SFF（お好みカット）	42
1520X	ニューイメージ FWF（お好みカット）	43
1540X	ニューイメージ FWF 凸面（お好みカット）	44
1550X	ニューイメージ FWF 凸面（プレカット）	44
1560X	ニューイメージ FTF（お好みカット）	45
1580X	ニューイメージ FTF 凸面（お好みカット）	46
1590X	ニューイメージ FTF 凸面（プレカット）	46
1610X	ニューイメージ FTF（プレカット）	45
1640X	ニューイメージ FWF（プレカット）	43
1650X	ニューイメージ SFF（プレカット）	42
1800X	ニューイメージ ドレイン ロックンロール	47
1801X	ニューイメージ イレオストミーパウチ	51
1810X	ニューイメージ ドレイン	48
1812X	ニューイメージ ドレイン 肌	48
1814X	ニューイメージ フィルター付 ドレイン 肌	48
1816X	ニューイメージ フィルター付 ドレイン	48
1818X	ニューイメージ ロックンロール 肌	47
1819X	ニューイメージ ロックンロール	47
1820X	ニューイメージ ミニドレイン肌	49
1828X	ニューイメージ ロックンロール ミニ 肌	49
1829X	ニューイメージ ロックンロール ミニ	49
1838X	ニューイメージ ミニクローズ	50
1839X	ニューイメージ ミニクローズ 肌	50
1890X	ニューイメージ ウロ S	52
1891X	ニューイメージ ウロ S 肌	52

製品番号	製品名	ページ
1892X	ニューイメージ ウロS ウルトラクリア	52
22100	モデルマフレックス SF クローズ 肌 (お好みカット)	20
221XX	モデルマフレックス SF クローズ 肌 (プレカット)	20
22500	モデルマフレックス SF クローズ (お好みカット)	20
26064	モデルマフレックス FT イレオストミーパウチ (お好みカット)	27
26700	モデルマフレックス FT ロックンロール (お好みカット)	25
267XX	モデルマフレックス FT ロックンロール (プレカット)	25
2690X	モデルマフレックス SF 凸面ロックンロール (お好みカット)	18
269XX	モデルマフレックス SF 凸面ロックンロール (プレカット)	18
28100	モデルマフレックス SF ロックンロール ミニ肌 (お好みカット)	19
281XX	モデルマフレックス SF ロックンロール ミニ肌 (プレカット)	19
28300	モデルマフレックス SF ロックンロール 肌 (お好みカット)	17
283XX	モデルマフレックス SF ロックンロール 肌 (プレカット)	17
28301	モデルマフレックス SF ロックンロール オーバル 肌 (お好みカット)	18
28400	モデルマフレックス SF ロックンロール (お好みカット)	17
284XX	モデルマフレックス SF ロックンロール (プレカット)	17
28401	モデルマフレックス SF ロックンロール オーバル (お好みカット)	18
29390XX	モデルマフレックス SF 凸面 ウロS (お好みカット)	31
29391XX	モデルマフレックス SF 凸面 ウロS (プレカット)	31
2949064	モデルマフレックス FT ウロS (お好みカット)	32
29491XX	モデルマフレックス FT ウロS (プレカット)	32
2959055	モデルマフレックス SF ウロS (お好みカット)	31
29790XX	モデルマフレックス FT 凸面 ウロS (お好みカット)	32
29791XX	モデルマフレックス FT 凸面 ウロS (プレカット)	32
29990XX	やわびた ウロS (お好みカット)	30
29991XX	やわびた ウロS (プレカット)	30
311X	ストマドレイン Q 肌	74
3184	ストマキャップ MC	80
322X	ストマドレイン KS	74
323X	こども用 カラヤ5 ドレイン	74
3250	お好みカット しなやかドレイン 肌	78
325X	しなやかドレイン 肌	78
3251	お好みカット コンパクトドレイン 肌	78
326X	凸面 しなやかドレイン 肌	79
327X	ストマドレイン KL	74
328X	凸面 コンパクト ドレイン	78
332X	カラヤ5 クローズ	73
334X	びたりん クローズ 肌	77
340X	びたりん ストマキャップ 肌	77

製品番号	製品名	ページ
3470	お好みカット しなやか クローズ 肌	79
347X	しなやか クローズ 肌	79
3494	凸面 クローズ 肌	80
360X	カラヤ5 ドレイン	73
361X	凸面 しなやかドレイン	79
366X	フィルター付 カラヤ5 ドレイン	73
372X	お好みカット びたりん バリア	76
373X	凸面 びたりん バリア	75
374X	びたりん バリア	76
376X	お好みカット びたりん ベース	75
3761	パウチキン 小児用 ツーピース SFF	70
3766	お好みカット びたりん ベース (フランジサイズ：102mm)	75
3777	パウチキン 未熟児用 パウチ	69
3778	パウチキン 新生児用 パウチ	69
378X	凸面 びたりん ベース	75
379X	お好みカット 凸面 びたりん ベース	75
3795	パウチキン こども用 ワンピース ロックンロール	70
3796	パウチキン 小児用 ワンピース ロックンロール	70
3799	パウチキン 小児用 ツーピース ロックンロール	70
380X	びたりん ドレイン	76
3806	びたりん ドレイン (フランジサイズ：102mm)	76
381X	びたりん ドレイン 肌	77
383X	フィルター付 びたりん ドレイン 肌	76
3843	びたりん ミニドレイン 肌	77
389X	フィルター付 びたりん ドレイン	76
390X	びたりん ウロ	77
5660X	モデルマフレックス FW 凸面ロックンロール 肌 (お好みカット)	23
566XX	モデルマフレックス FW 凸面ロックンロール 肌 (プレカット)	23
5670X	モデルマフレックス FW 凸面ロックンロール (お好みカット)	23
567XX	モデルマフレックス FW 凸面ロックンロール (プレカット)	23
56810XX	やわびた 素肌 (お好みカット)	21
56811XX	やわびた 素肌 (プレカット)	21
56910XX	やわびた (お好みカット)	21
56911XX	やわびた (プレカット)	21
5790X	モデルマフレックス FT 凸面ロックンロール (お好みカット)	26
579XX	モデルマフレックス FT 凸面ロックンロール (プレカット)	26
58300	モデルマフレックス FW ロックンロール 肌 (お好みカット)	22
583XX	モデルマフレックス FW ロックンロール 肌 (プレカット)	22
58400	モデルマフレックス FW ロックンロール (お好みカット)	22


製品番号	製品名	ページ
584XX	モデルマフレックス FW ロックンロール（プレカット）	22
7300-1	アダプト オストミーベルト	62
7331	ウ口接続管 S	65
7700	ホリスター スキンバリア（規格：10×10cm）	61
7701	ホリスター スキンバリア（規格：20×20cm）	61
7731	アダプト剥離剤スプレー（76ml）*	60
7732	m9 消臭スプレー 60ml ボトル	56
7733	m9 消臭スプレー 240ml ボトル	56
7736	m9 クリーナー	66
7737	アダプトはくり剤スプレー 得楽タイプ（50ml）	60
7760	アダプト剥離剤パック	60
7766	消臭ガス抜きフィルター	62
7805	アダプト皮膚保護シール 48mm	57
7806	アダプト皮膚保護シール 98mm	57
7815	アダプト皮膚保護シール スリム	57
78500	アダプト消臭潤滑剤 236ml ボトル	55
78501	アダプト消臭潤滑剤 8ml パック	55
7900	プレミアム 皮膚保護シート（規格：10×10cm）	61
7901	プレミアム 皮膚保護シート（規格：20×20cm）	61
7905	カラヤパウダー 71g	62
7906	アダプトストーマパウダー 28.3g	59
7910	カラヤペースト 128g	62
7917	アダプト保護膜パック	59
79300	アダプト皮膚保護ペースト 60g	61
79301	アダプト皮膚保護ミニペースト	61
79520	アダプト皮膚保護凸面リング 20mm	58
79530	アダプト皮膚保護凸面リング 30mm	58
79540	アダプト皮膚保護凸面リング 40mm	58
79601	アダプト皮膚保護凸面リング オーバル 22×38mm	58
79602	アダプト皮膚保護凸面リング オーバル 30×48mm	58
79603	アダプト皮膚保護凸面リング オーバル 38×56mm	58
857X	やわびた FT（お好みカット）	24
866X	やわびた FT 素肌（プレカット）	24
867X	やわびた FT 素肌（お好みカット）	24
8770	ドレインストッパー 肌	62
8800	フレックステンド 皮膚保護シート（規格：10.2×10.2cm）	61
8801	フレックステンド 皮膚保護シート（規格：20.4×20.4cm）	61
9342	インケア・ストラップ（2本1組） 38cm	65
9343	インケア・ストラップ（2本1組） 58cm	65

* 2018 年 6 月末日に販売を終了致します。

製品番号	製品名	ページ
9345	インケア・チューブラテックスフリー 46cm	65
9346	インケア・チューブラテックスフリー 46cm（滅菌）	65
9701	滅菌 みるみるドレイン（カット可能サイズ：0～76mm）	81
9702	滅菌 みるみるドレイン（カット可能サイズ：0～95mm）	81
9805	インケア・レッグバッグ 900ml（滅菌）	65
9814	インケア・レッグバッグ 540ml（滅菌）	65
9834	レッグバッグセット 540	66
9835	レッグバッグセット 900	66
9839	ベッドサイド・ドレンバッグ（滅菌）	66


使用方法

ロックンロール マイクロシール閉鎖方法

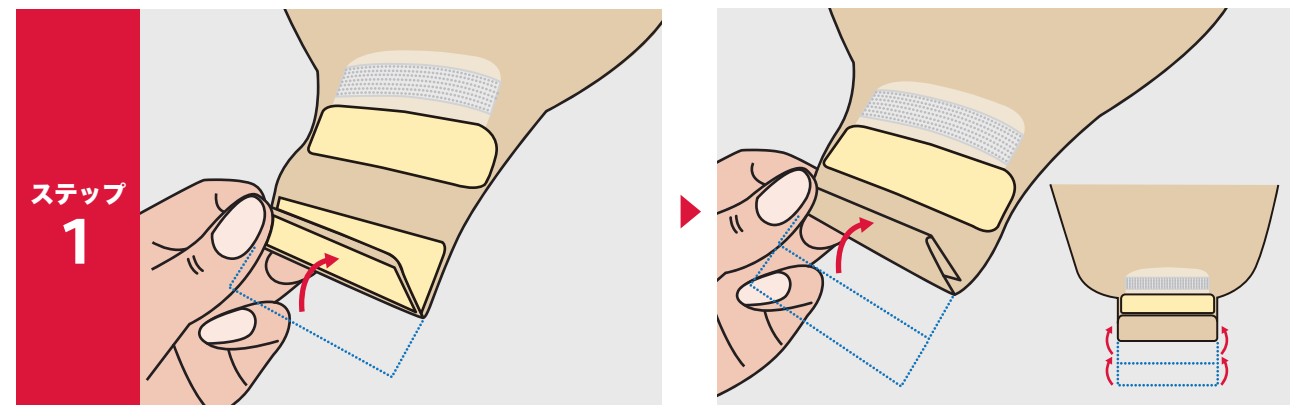

裾のプレートに**2回**巻き上げます。


2回巻き上げた状態。

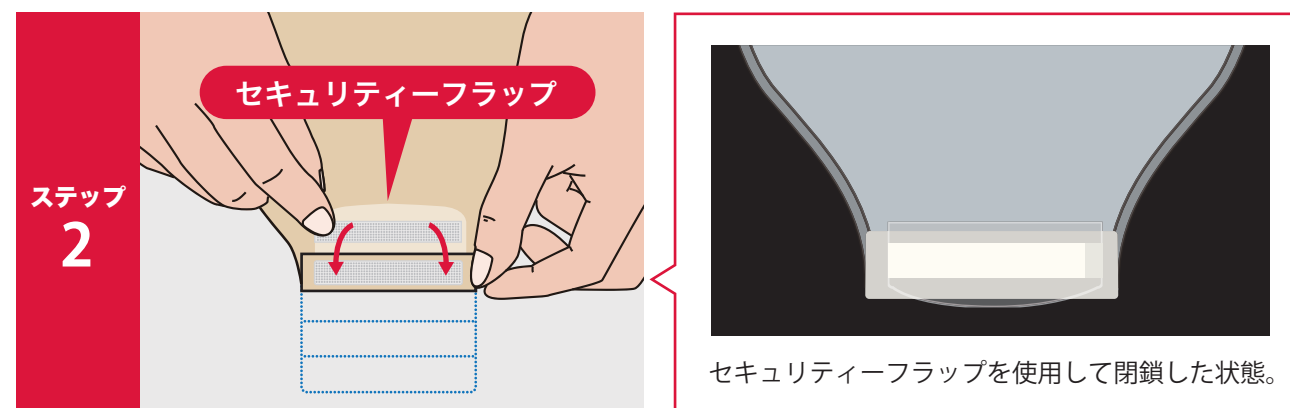

最後にもう1回巻き上げ（計3回）、セキュリティーフラップを上から下にかぶせてマイクロシールを閉鎖します。

セキュリティーフラップを使用して閉鎖した状態。

ロックンロール マイクロシール排出方法

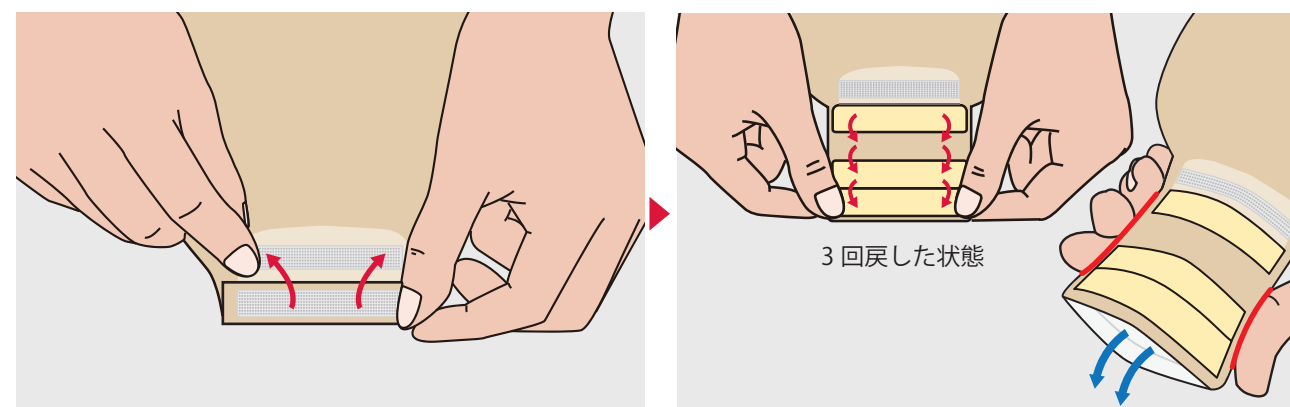


閉鎖時とは逆の手順でセキュリティーフラップを開いて閉鎖部分を外してください。

3回戻してから、赤い部分を押さえて、排出口を開き、排出作業を行います。



使用方法

テープ裏紙のはがし方のコツ（単品系装具・二品系装具共通）

テープ付皮膚保護剤のテープの裏紙がはがれにくい際は、以下の方法をおためしてください。

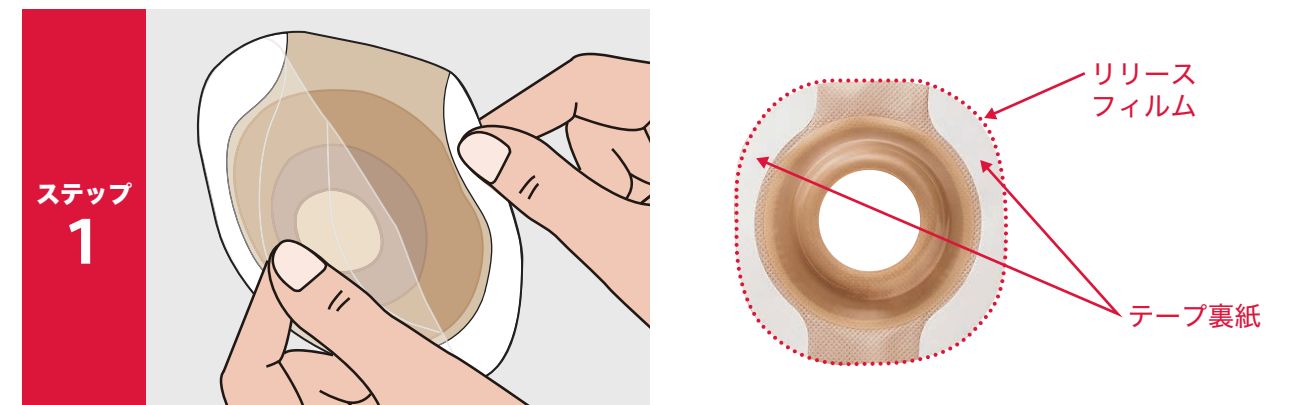

リリースフィルムをはがします。

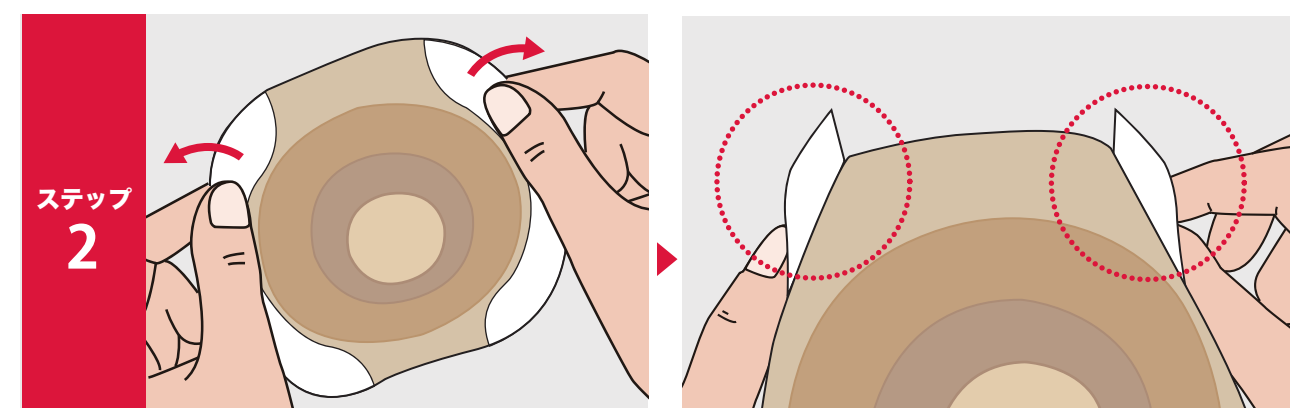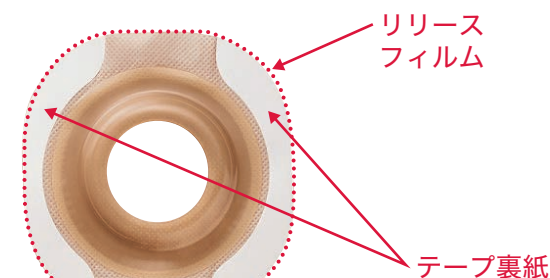


テープの幅がある部分を図のように手に取り、後ろ側に引き、裏紙を浮かせます。

テープの裏紙の先端が図のようにはがれます。

より簡単に！

腹壁に面板を貼付してから
裏紙をはがす方へ

面板を腹壁に貼付する前に、ステップ2で浮かせた部分をあらかじめ折り曲げておくことによりスムーズにはがせます。

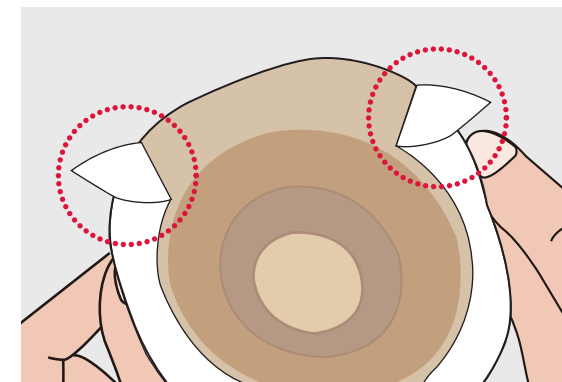

Our Mission

私たちのミッション

私たちの製品とサービスを使用する方々の人生を、
より価値があり尊厳に満ちたものにします。

To make life more rewarding and dignified for people
who use our products and services.

ホリスター社の歴史

ホリスター社のルーツは 1921年、シカゴにてジョン・ディッキンソン・シュナイダーによって設立された『JDS プリンター・クラフツマン』という名の印刷会社です。そのシュナイダーが初めて医療に関わった製品は、

フランクリン・ホリスター社が発注した出生証明書でした。本来、事務的な証明書としてシンプルであった出生証明書を、彼の哲学である細やかな心遣いにより見事な高級出生証明書として製品化し、

新生児のご両親にとっても喜ばれました。その評判は瞬く間に全米に広がり、その後、1948年にホリスター社を

自社の一部門として買収し、現在に至っております。

彼の哲学である細やかな心遣いは現在も、質の高い製品、サービス、そして全社員の中にも脈々と生き続けており、ホリスターブランドの赤はパワーとエネルギーを象徴しています。



ジョン・ディッキンソン・シュナイダー

ホリスター社の沿革

1921 「JDS プリンター・クラフツマン」設立

1948 ホリスター社を買収

1963 ストーマ装具用皮膚保護剤「カラヤシールリング」開発

1964 「カラヤシールリング」付ストーマ袋発売

1981 米国本社をイリノイ州シカゴ中心部から北部に位置するリバティビル市へ移転

1989 デンマーク・ダンサック社をグループの一員として迎える

1996 株式会社ホリスター 日本法人設立

1999 「ニューイメージ」シリーズ発売

2002 「アダプト」シリーズ発売

2003 「モデルマフレックス」シリーズ発売

2004 世界初ストーマ袋専用「アダプト消臭潤滑剤」発売

2006 「アダプト皮膚保護シール」発売

2008 通気性、消臭機能、撥水機能に優れた「AF300 オストミーフィルター」付製品発売

2010 安全性・操作性・快適性が向上した閉鎖具「ロックンロールマイクロシール」付製品発売

2011 米国ホリスター創立 90 周年
成形可能な皮膚保護剤を用いた面板「ニューイメージ FFF テープ付」発売

2014 「ニューイメージ ウロ S」シリーズ発売

2015 業界初 やわらかい凸面+テープ「やわびた」発売

ホリスターの 個別ケア

- 商品のお問い合わせやご注文に際しては、品名、製品番号、規格などをお知らせください。
- 明記されている価格は「メーカー希望小売価格」です。
- 商品の仕様、価格は2018年5月1日現在のものです。仕様、価格、付属品等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品は直射日光の当たらない涼しい場所で保管して下さい。
- ご使用に際しては使用説明書をよく読み、正しくお使い下さい。
- 装具を選択する際は、医療従事者とご相談ください。



株式会社 ホリスター

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲21F

☎0120-032-950 (9:00～17:00 土・日・祝日・年末年始を除く)

FAX:(03)6711-2861

製造元 Hollister Incorporated

www.hollister.co.jp